



Gebrauchsfertig getränkte Tücher zur Desinfektion von Flächen.

perform[®] classic wipes EP

Unser Plus

- effektiv und schnell
- mit 220 (fast DIN A4 grossen) Jumbotüchern pro Dose besonders ergiebig
- farbstofffrei
- Euro-Norm geprüfte Wirksamkeit

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Flächen in Bereichen, in denen eine schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist.

Anwendungshinweise

Tücher im schrägen Winkel nach unten abreißen. Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig	2 Min.
begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	30 Sek.



Produktdaten

Eine Dose enthält 220 gebrauchsfertig getränkte Tücher.
1 g Wirkstofflösung enthält:
0,25 g Ethanol (94 %ig), 0,35 g Propan-1-ol

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C / der Wirkstofflösung
Farbe	farblos
Flammpunkt	27 °C / Methode: DIN 51755 Part 1 / der Wirkstofflösung
Form	Wässrig-alkoholische Lösung auf Vliesstoff
pH	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etiketten und Produktinformationen lesen.

Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden.
Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Nitrilkautschuk) wird empfohlen.

BauA Reg.-Nr. N-30999/ N-31010
Schweizer Zulassung: CHZN0738

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform classic wipes EP 200 ST DS	10/Karton	70000186
perform classic wipes EP 220 ST DS	10/Karton	70003099

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat perform[®] classic wipes EP vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Sales Service
Telefon: +41 44 466 55 44
E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com