



schülke -+

Le kit de transformation pour le système hyclick® est composé de deux pièces:



Le centreur du flacon hyclick®



Le couvercle hyclick®



Le kit de transformation destiné au système hyclick® peut être commandé en deux versions.

Kit de transformation de système hyclick® pour distributeur Euro Plus manuel (p. ex. ingo-man® plus, KHK, KHL) N° d'art.

Carton de 6 x kit de transformation hyclick® 500 ml 60000485
Carton de 6 x kit de transformation hyclick® 1 l 60000486

Éléments adaptés: hyclick® flacons à usage unique pour désinfection et nettoyage des mains



Désinfection des mains

desderman® care hyclick® flacon N° d'art.
Carton de 20 flacons de 500 ml hyclick® 70002335
Carton de 10 flacons de 1 l hyclick® 70002341



Nettoyage des mains

sensiva® wash lotion hyclick® flacon N° d'art.
Carton de 20 flacons de 500 ml hyclick® 70000138
Carton de 10 flacons de 1 l hyclick® 70000137



Désinfection des mains

desmanol® pure hyclick® flacon N° d'art.
Carton de 20 flacons de 500 ml hyclick® 70000817
Carton de 10 flacons de 1 l hyclick® 70001795



Nettoyage des mains

esemtan® wash lotion hyclick® flacon N° d'art.
Carton de 20 flacons de 500 ml hyclick® 70000134
Carton de 10 flacons de 1 l hyclick® 70000133

 www.linkedin.com/company/schulke-schweiz

 www.youtube.com/schuelkeChannel

 www.facebook.com/myschulke

Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22 | 8500 Frauenfeld | Suisse
Tél. +41 44 466 55 44
mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.ch

Vous souhaitez obtenir des conseils approfondis sur le système hyclick®? Contactez-nous!



+41 44 466 55 44



mail.ch@schuelke.com

INSTRUCTIONS

Le kit de transformation est composé de deux pièces:



(A)
le couvercle
hyclick®



(B)
le centreur
du flacon
hyclick®



Préparation



1 Retirez d'abord le flacon vide.



2 Pour démonter la pompe existante, ouvrez le couvercle.



3 Un bouton de déverrouillage «Push» se trouve sur le côté droit. Appuyez sur le bouton pour retirer la pompe.



4 Fermez le couvercle puis avec une main, tirez la tige de maintien vers l'avant du distributeur.




5 Avec l'autre main, décrochez le couvercle vers le bas, puis vers l'avant. Le kit de transformation hyclick® peut maintenant être installé.


Vidéo:
Adaptez facilement votre distributeur




Montage

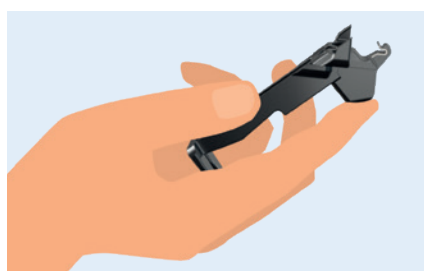


6 Insérez d'abord le centreur du flacon. Maintenez-le du mieux possible incliné vers le bas et soutenez la pièce d'extrémité avec l'index.

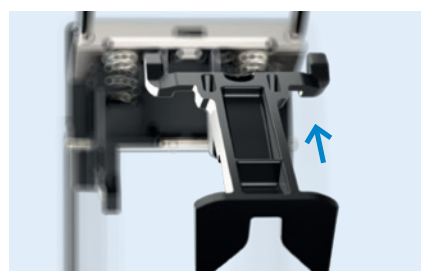

7 Le centreur du flacon peut maintenant être inséré via les rails de guidage.

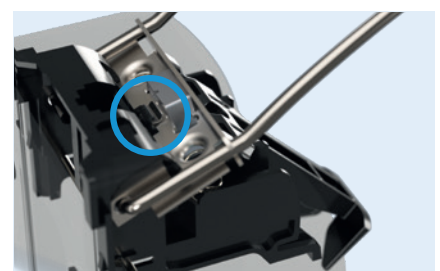

8 En poussant vers le bas, accrochez le clip métallique dans l'habillage arrière du distributeur.

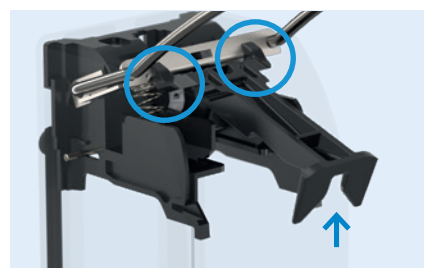

9 Enclenchez ensuite le centreur du flacon en glissant les tenons devant le cache métallique.



10 Vous pouvez maintenant monter le couvercle hyclick®. Pour ce faire, insérez les glissières du couvercle dans le rail de l'ancienne pompe jusqu'à ce qu'un click retentisse.



11 Mettez ensuite le nouveau flacon en place. Retirez au préalable la fermeture de sécurité rouge avant première ouverture. Et, le tour est joué!