

Tableau de Dosage gigasept® pearls

schülke -†

gobelet de dosage: 100 g granule \triangleq 150 ml

cuillère de dosage remplie \triangleq 40 g granule \triangleq 60 ml

Litres Solution	dosage de la solution d'emploi	
	1 %	2 %
2 litres	30 ml (\triangleq 20 g)	60 ml (\triangleq 40 g)
4 litres	60 ml (\triangleq 40 g)	120 ml (\triangleq 80 g)
8 litres	120 ml (\triangleq 80 g)	240 ml (\triangleq 160 g)
10 litres	150 ml (\triangleq 100 g)	300 ml (\triangleq 200 g)
20 litres	300 ml (\triangleq 200 g)	600 ml (\triangleq 400 g)
30 litres	450 ml (\triangleq 300 g)	900 ml (\triangleq 600 g)

Consignes d'utilisation:

Ajouter la quantité de granulés correspondante selon le volume d'eau moyennant le verre ou la cuillère de dosage. Remuer plusieurs fois, les premières 15 minutes. Une fois cette durée d'activation écoulée, la solution est prête à l'emploi. Conformément aux recommandations RKI, renouveler la solution tous les jours de travail et lors de contamination visible importante.