



Pour l'application de désinfectants pour les mains, de lotions lavantes et soignantes

## Distributeur de préparation sm2

### Notre plus

- pas de contamination bactérienne et d'évaporation grâce à la construction unique des pompes et de la fermeture intégrée du flacon
- robinet protégé contre les contacts et la contamination
- vidage presque complet des résidus du récipient par tuyau d'aspiration flexible
- pompe de dosage réglable : 1, 2 ou 3 ml
- nettoyage facile et, le cas échéant, désinfection par démontage facile et complet du distributeur et de la pompe
- montage facile
- sm 2 universal - convient aux flacons de 500 ml à 1 000 ml
- sm 2 500 - convient aux flacons de 500 ml

### Domaines d'utilisation

Dosage simple et précis des désinfectants pour les mains, des lotions lavantes et soignantes.

- Dose les quantités de solution nécessaire grâce à la pompe de dosage réglable en quantités de 1, 2 ou 3 ml par poussée.
- le système de pompe et le robinet d'écoulement sont coordonnés et tiennent compte des différentes viscosités de la solution.
- Verrouillage hermétique par robinet d'écoulement unique : pas de gouttage, pas de fuite, pas d'assèchement, pas d'évaporation, pas de contamination.

### Conseils d'utilisation

#### Changement de produit

En cas de changement de produit, seule la bouteille à usage unique doit être changée et le système de pompe amovible doit être rincé.

L'étiquette de la bouteille est en même temps l'étiquette du distributeur.

#### Nettoyage et désinfection

Le distributeur mural se démonte sans outils. Les surfaces plates et polies permettent un nettoyage facile et une désinfection avec les lingettes perform<sup>®</sup> et mikrozyd<sup>®</sup> AF.

#### Valve d'écoulement

##### Arrêt

Valve fermée (fig. 1). Ici, une évaporation n'est pas possible.

##### Opération de prélèvement

Le produit est distribué via la pression de la pompe.

La valve d'écoulement est conçue de sorte à ne s'ouvrir que lorsque le levier est actionné (via la pression de la pompe). Le produit peut ensuite s'écouler (fig. 2). Ceci permet d'éviter un jet puissant et des éclaboussures.

La valve se referme dès que le point de pression inférieur est atteint.

Le joint supplémentaire à l'extrémité la plus basse de l'orifice d'écoulement (fig. 3) empêche que des gouttes ne coulent lorsque la valve est fermée.

#### Levier d'actionnement

Il peut être actionné par le coude ou l'avant-bras.

Le levier peut être relevé afin de changer la pompe ou pour régler le dosage.



# Distributeur de préparation sm2

## Données relatives au produit

### sm 2 500

Largeur : 8,2 cm

Profondeur : 20,5 cm (avec levier)

Hauteur : 27,0 cm

### sm 2 universal

Largeur : 10,4 cm

Profondeur : 21,0 cm (avec levier)

Hauteur : 30,0 cm

pour tous les flacons jusqu'à 1000 ml disponibles sur le marché

## Remarques particulières

### Caractéristiques techniques :

contrôle du niveau de remplissage : constant grâce aux récipients transparents

Matériaux : boîtier en plastique ABS, parties métalliques en acier spécial

### Instructions de montage :

Fixation standard :

- 2 trous oblongs en haut et un trou oblong en bas
- Meilleure fixation statique pour distributeur de solution par disposition en T adaptée à tous les joints de carrelage

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Doseur SM2 Universal	1/Carton	668500
Diffuseur SM2 500	1/Carton	668600

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Schalhalter SM 2 kompl.	668510

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation Präparatespender sm2 sur l'internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles:

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)