

# schülke -+



Tekutý bezalkoholový dezinfekční přípravek určený k rychlému čištění a dezinfekci povrchů citlivých na alkohol.

Na citlivé  
povrchy

## desprej<sup>®</sup> sensitive

### Naše Plus

- Šetrná dezinfekce
- Vhodný i na citlivé materiály
- Velmi rychlý účinek
- Ihned k použití
- Jemně parfemován příjemnou vůní

### Oblast použití

**desprej<sup>®</sup> sensitive** je vhodný pro oblast zdravotnictví, ordinace lékařů, ústavy sociální péče, domácí péči a obecnou praxi. Vhodný přístroje a pomůcky z plastů a plexiskel (inkubátory, displaye, UZV sondy, klávesnice, monitory atd.). Výborný pro ošetření špatně dostupných míst a všude tam, kde je nutno zajistit rychlý dezinfekční efekt.

### Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní (BVDV/Vaccinia/MVA), mykobaktericidní.  
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

Předem odstraňte hrubé nečistoty. Aplikujte přípravek postříkáním tak, aby byl povrch rovnoměrně a zcela smočen. Nechejte přípravek účinkovat po dobu požadované mikrobiologické účinnosti. Poté přebytečnou vlhkost setřete jednorázovou utěrkou.  
Lesklé povrchy a povrchy obrazovek setřete po době expozice dosucha čistou a suchou jednorázovou utěrkou.



## Složení

100 g přípravku **desprej<sup>®</sup> sensitive** obsahuje následující aktivní látky:

- 0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 0,05 g Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid
- 0,05 g Didecylidimethylamonium chlorid

## Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveno
Forma	Kapalina
Hustota	1,01 - 1,03 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	7,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	> 95 °C / Metoda : Vypočtená hodnota

## Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na materiály ze silikonu, barevných kovů (měď, mosaz, hliník, zinek), gumy, měkčeného PVC a polyamidu.

Doba expirace: 24 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desprej sensitive 500 ml	20/Karton	70000072
desprej sensitive CZ_SK 5 kg	1/Kartón	70004091
desprej sensitive CZ_SK 500 ml	1/Karton	70004090
Desprej sensitive 5 kg	1/Kanistr	70000073

## Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

## Typ přípravku

Biocidní přípravek



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com