

Zur antimikrobiellen Patientenwaschung, präoperativen Patientenvorbereitung sowie zur Ganzkörperansterilung ohne Wasser.

schülke antimikrobielle Waschhandschuhe 2 % CHX

Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), begrenzt viruzid (inkl. Coronaviren) und levurozid

Unser Plus

- wirksam gegenüber Bakterien (inkl. MRSA), Hefen und begrenzt viruzid (inkl. Coronaviren)
- gebrauchsfertig, beidseitig verwendbar, kein Nachspülen notwendig
- auch im Gesicht zu verwenden
- Erwärmen in der Mikrowelle oder im Wärmeschrank möglich
- mit Allantoin für zusätzliche Pflege der Haut

Anwendungsgebiete


Gebrauchsfertige Einmalwaschhandschuhe zur antimikrobiellen Patientenwaschung, präoperativen Patientenvorbereitung sowie zur Ganzkörperansterilung ohne Wasser. **Ausschließlich für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt.**

Anwendungshinweise

Haut reinigen und mindestens 2 Minuten einwirken lassen. Bei Raumtemperatur lagern. Anwendung bei Raumtemperatur oder erwärmt (Mikrowelle 30 Sek./600 Watt oder Wärmeschrank). Das Produkt vorsichtig in der Nähe der Augen verwenden.

Ein Handschuh pro Körperregion

1. Gesicht, Nacken und Brust
2. Rechter Arm und Achselhöhle
3. Linker Arm und Achselhöhle
4. Unterleib vorne
5. Rechtes Bein
6. Linkes Bein
7. Rücken
8. Unterleib hinten

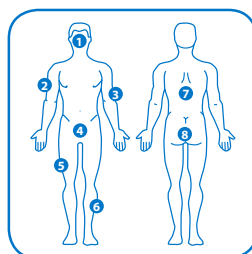

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727	gebrauchsfertig	30 Sek.
MRSA EN13727	gebrauchsfertig	30 Sek.
levurozid EN13624	gebrauchsfertig	1 Min.
begrenzt viruzid EN14476	gebrauchsfertig	2 Min.



schülke antimikrobielle Waschhandschuhe 2% CHX

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Tränklösung enthalten: 2 g Chlorhexidindigluconat.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte: ca. 1,01g/cm³ (20° C) der Wirkstofflösung

Farbe: farblos

Flammpunkt: > 100° C der Wirkstofflösung

pH-Wert: 5,7 (20°C) Konzentration: 100% der Wirklösung

Viskosität, dynamisch: ca. 1 m Pa*s der Wirkstofflösung

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nicht anwenden bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf Chlorhexidindigluconat. Von Augen, Ohren und Mund fernhalten. Nicht geeignet für Säuglinge. Vor Sonneneinstrahlung schützen. BAuA Reg.-Nr.: N-95708

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
schülke antimikrobielle Waschhandschuhe 2% CHX 8 ST/SP	30/Karton	70002916

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com