



Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

perform®
granulat

Zalety

- nie zawiera aldehydów
- wyjątkowo szerokie spektrum działania
- możliwość stosowania w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory)
- możliwość stosowania do wycisków stomatologicznych
- bardzo wysoka kompatybilność materiałowa

Obszary zastosowania

Mycie i dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych. Ze względu na niezwykle szerokie spektrum działania oraz wysoki profil bezpieczeństwa perform® nadaje się doskonale do wszelkich zastosowań w obszarach wysokiego ryzyka. Dzięki doskonałej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego preparat perform® można stosować również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory). perform® przeznaczony jest także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji (dezynfekcja przez zanurzenie).

Właściwości produktu

Wysoko wydajny preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, na bazie aktywnego tlenu, który uwalniany jest w trakcie rozpuszczania się granulatu w wodzie. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, poliovirusa, norowirusa, wirusa polyoma SV40 oraz sporobójczo (wobec Clostridium difficile). perform® wykazuje także skuteczność wobec bakterii i grzybów przy dezynfekcji wycisków stomatologicznych (w stężeniu 1% w czasie 5 min.) oraz przy krótkofalowej dezynfekcji wanien kąpielowych (w stężeniu 1% w czasie 15 min.)

Wskazówki dotyczące stosowania

Przygotować roztwór wodny: do wiadra lub wanienki zawierającej odpowiednią ilość wody wsypać granulatu zgodnie z informacjami na etykiecie i krótko zamieszać. Roztwór użytkowy w zadanym stężeniu nanosić na dezynfekowaną powierzchnię metodą przecierania na mokro. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie powierzchni. W celu dezynfekcji masek do ćwiczeń, poszczególne części składowe umieścić w roztworze użytkowym, po upływie czasu oddziaływania wyjąć z roztworu a następnie spłukać wodą. Dobrą rozpuszczalność granulatu uzyskuje się przez użycie wody o temperaturze ciała i zamieszanie roztworu. perform® charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami czyszczącymi. Dlatego też nie jest konieczne dodawanie do niego środków wspomagających efekt czyszczący.

CE 0297



Dane produktu

100g preparatu perform[®] zawiera:
45 g bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu.
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (EC) 648/2004: 5 - 15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % mydło, < 5 % fosfoniany, kompozycje zapachowe.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciało stałe granulowany
Kolor	biały
pH	ok. 4 / 5 g/l / 20 °C / roztworu wodnego
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Środki dezynfekcyjne należy stosować w sposób bezpieczny. Zawsze przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i ulotki informacyjnej. Torebek, względnie pojemników, nie należy przechowywać w temperaturze wyższej niż temperatura pokojowa. Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Zaleca się używanie rękawic ochronnych (np. z kauczuku butylowego). Roztwór użytkowy może powodować blaknięcie wrażliwych materiałów tekstylnych. Nie stosować na wykładziny dywanowe. Roztwory użytkowe utrzymują trwałość przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność bójczą.

Nie stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 40g - 2 lata, 900g - 1,5 roku

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
PERFORM granulat -PL,CZ.SK- 900 g DS	4/Karton	122323
perform -PL- (250x) 40 g BT	250/Karton	70001861

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Produkt do użytku profesjonalnego.



GERÄTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-150-10003



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com