

schülke -†



dialox™ active

dialox™ active jest wysoce wydajnym preparatem dezynfekcyjnym oraz odkamieniającym na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody

Zalety

- szerokie spektrum bójcze
- dezynfekcja i odkamienianie w jednym cyklu
- krótki czas kontaktu
- wykrywalny konduktometrycznie

Obszary zastosowania

Unikatowy preparat do dezynfekcji oraz dekalcyfikacji urządzeń do hemodializy oraz stacji uzdatniania wody.

- kompatybilny z urządzeniami do hemodializy
- kompatybilny z wyposażeniem do uzdatniania wody
- zapobiega tworzeniu biofilmu

Właściwości produktu

dialox™ active działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo oraz wirusobójczo wobec adenowirusa i wirusa polio.

Wskazówki dotyczące stosowania

Preparat dialox™ active może być stosowany regularnie do dezynfekcji oraz odkamieniania urządzeń do hemodializy w programach dezynfekcji chemicznej. Proporcje preparatu dialox™ active są obliczane automatycznie, preparat jest rozcieńczany przez urządzenie dializacyjne zgodnie z zaleceniami producenta np. 1/25 lub 1/35 w temp. 20 lub 37 st. C. Preparat pozwala na jednoczesną dezynfekcję oraz dekalcyfikację urządzeń. Proces płukania powinien być kontrolowany przy użyciu pasków testowych do oznaczania pozostałości nadtlenu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi hemodializatora.

CE 0297



dialox™ active

Dane produktu

Skład: 100g dialox™ active zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	1,04 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	bezbarwny
pH	0,8 / 20 °C / koncentrat
Tarcie, dynamiczne	nie określono
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Przechowywać w temperaturze 5-30 st. C. Zapewnić sprawną wentylację w pomieszczeniach. Zachować ostrożność przy otwartych kanistrach. Trzymać z dala od źródeł ciepła, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie pozostawiać otwartych kanistrów. Przechowywać w pozycji stojącej.

Kompatybilność materiałowa: dialox™ active posiada dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, PTFE, PVDF, PEHD, PP.

Interakcje: Mieszanie dialox™ active z innymi produktami jest zabronione.

Termin ważności: 24 miesiące.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
dialox Active 5 l KA	1/Kanister	104149

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-10023



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.com

Wytwórca:
Bioxal SA
Route des Verennes 71100
Chalon Sur Saone
Francja