

schülke →



Nepenív neutrálny enzymatický tekutý čistič na báze neionogénnych tenzidov. Vhodný k manuálnemu a poloautomatickému čisteniu endoskopov a chirurgických nástrojov. Vhodný pre použitie v UZV kúpeľoch

**Vynikajúci
čistiaci účinok**

gigazyme®

Naše Plus

- Trojkombinácia enzýmov pre vynikajúce čistiace účinky
- Čistí bez reziduí
- Vhodný aj do UZV čističiek

Oblasti použitia

gigazyme® sa používa k ručnému a poloautomatickému čisteniu flexibilných endoskopov a chirurgických nástrojov. Je vhodný aj pre čistenie nástrojov v UZV kúpeľoch.

Návod na použitie

gigazyme® sa riedi studenou vodou na požadovanú koncentráciu pracovného roztoku. Endoskopy a nástroje určené na reprocessing sa ponorí do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti. Po dôkladnom očistení sa endoskopy a nástroje vyberú z roztoku a dôkladne opláchnu vodou požadovanej kvality. Optimálnych čistiacich účinkov je možné dosiahnuť vo vode o izbovej teplote. Teplota roztoku by nemala prekročiť 32 ° C. Vyššie teploty spôsobujú zakalenie roztoku, ktoré opäť zmizne pri pridaní studenej vody. Pracovné roztoky sú použiteľné po dobu max. 1 dňa. Odporúčaná koncentrácia:

- podľa miery znečistenia nástrojov 0,5-2% / 5 min.
- pri extrémnom znečistení možné zvýšiť až na 5%

Vysoká teplota vody spôsobuje koaguláciu bielkovín (krvi) a sťažuje čistenie. Testami bolo dokázané, že najlepšie čistiace účinky sú dosiahnuté pri izbových teplotách (čistá voda).

CE



Zloženie

5-15% neionogénne tenzidy, enzýmy, korózne inhibítory, farbivá, parfém

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	43 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Farba	modrý
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	7 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Skladovať pri izbových teplotách. Chráňte pred teplom a slnečným svetlom. Doba expirácie: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Gigazyme 2 l	5/Kartón	132105
gigazyme -INT- 2 l FL	5/Kartón	70003409

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok tr. I



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com