

# schülke -†



Tekutý bezalkoholový dezinfekčný prípravok určený k rýchlemu čisteniu a dezinfekcii povrchov citlivých na alkohol.

Na citlivé  
povrchy

## desprej<sup>®</sup> sensitive

### Naše Plus

- Šetrná dezinfekcia
- Vhodný na citlivé materiály
- Veľmi rýchly účinok
- Ihneď k použitiu
- Jemne parfumovaný príjemnou vôňou

### Oblasti použitia

Desprej sensitive je vhodný pre oblasť zdravotníctva, ordinácie lekárov, ústavy sociálnej starostlivosti, domácu starostlivosť a všeobecnú prax. Vhodný na pomôcky z plastov a plexiskiel (displeje, klávesnice, monitory atď.). Výborný na ošetrovanie zle dostupných miest a všade tam, kde je potrebné zaistiť rýchly dezinfekčný efekt.

### Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny (BVDV/Vaccinia/MVA), mykobaktericídny.  
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

### Návod na použitie

Vopred odstráňte hrubé nečistoty. Aplikujte prípravok postrekom tak, aby bol povrch rovnomerne a úplne namočený. Nechajte prípravok účinkovať po dobu požadovanej mikrobiologickej účinnosti. Následne prebytočnú vlhkosť utrite jednorazovou utierkou. Lesklé povrchy a povrchy obrazoviek utrite po dobe expozície dosucha čistou a suchou jednorazovou utierkou.



## Zloženie

100 g prípravku **desprej sensitive** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 0,05 g Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid
- 0,05 g Didecylidimethylamonium chlorid

## Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	> 95 °C / Metóda : Vypočítaná hodnota
Dynamická viskozita	neurčené
Farba	bezfarebný
Forma	Kvapalina
Hustota	1,01 - 1,03 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	7,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C

## Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh. Nevhodný na materiály zo silikónu, farebné kovy (meď, mosadz, hliník, zinok), gumené, mäkký PVC a polyamid.

Doba expirácie: 24 mesiacov.

## Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Desprej sensitive 500 ml	20/Kartón	70000072
desprej sensitive CZ_SK 5 kg	1/Kartón	70004091
desprej sensitive CZ_SK 500 ml	1/Kartón	70004090
Desprej sensitive 5 kg	1/Kanister	70000073

## Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

## Typ prípravku

Biocídny prípravok



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

**Distribútor**  
Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
www.schulke.sk  
schulkesk@schuelke.com

**Výrobca**  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumin, Česká republika  
Telefón +420 558 320 260  
www.schulke.cz