

schülke →



Tekutý alkalický čistič pro strojový reprocessing zdravotnických prostředků a laboratorního vybavení.

Automatický
reprocessing - mytí

thermosept® RKF

Naše Plus

- Snadno smývatelný
- Neobsahuje fosfáty ani tenzidy
- Silný čisticí účinek
- Formulace se sníženou pěnovostí

Oblast použití

Vhodný pro termický a chemotermický reprocessing chirurgických a mikrochirurgických nástrojů, rigidních endoskopů, anesteziologického vybavení, operační obuvi, podložních mís, kojeneckých lahví a kontejnerů z nerezové oceli. Vhodný na vybavení ze skla, porcelánu, plastů a nerezové oceli.

Před reprocessingem pomůcek z eloxovaného hliníku se ujistěte, zda jsou pomůcky kompatibilní s alkalickým čističem. V případě, že kompatibilní nejsou, použijte neutrální **thermosept® RKN-zym** nebo mírně alkalický **thermosept® X-tra**.

thermosept® RKF je určen pro použití v mycích dezinfektorech a multi-komorových mycích dezinfektorech.

Návod na použití

Dávkování:

- 0,3-1% (3-10 ml/l)
- standardní dávkování 0,5% (5 ml/l) při teplotě 55 °C - 60 °C po dobu 3-10 min

Koncentrace, doba čištění a teplota jsou závislé na míře znečištění nástrojů. Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla v mycím automatu nebo dezinfektoru. Jako prevence vzniku alkalických reziduí se doporučuje oplach s neutralizátorem **thermosept® NKZ**.

thermosept® RKF není vhodný pro zdravotnické prostředky a předměty z eloxovaného hliníku. Na čištění předmětů z materiálů citlivých na alkálie použijte **thermosept® RKN-zym** nebo **thermosept® X-tra**. Pro další krok a finální

oplach v rámci automatického reprocessingu použijte demineralizovanou vodu. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

CE



Složení

< 5% fosfonátů, hydroxid draselný, inhibitory koroze

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý - žlutý
Dynamická viskozita	cca. 3 mPa*s / Metoda : ISO 3219
Forma	kapalný
Hustota	1,12 - 1,13 g/cm ³ / 20 °C
pH	14 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	> 100 °C / Metoda : ISO 2719

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Při manipulaci s koncentrátem použijte osobní ochranné pomůcky, zamezte kontaktu s pokožkou a očima. Předměty z eloxovaného hliníku musí být otestovány na kompatibilitu s alkáliemi.

Doba expirace: 60 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Thermosept RKF 10 Kg	1/Kanistr	146309
Thermosept RKF 5 Kg	1/Kanistr	146305

Související přípravky

- thermosept® NKP
- thermosept® NKZ

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com