

schülke -†



Tekutý dezinfekční a dekalcificační přípravek na bázi aktivního kyslíku určený pro dialyzační jednotky a systémy vodních okruhů.

Na dialýzy

dialox™

Naše Plus

- Dezinfekce, čištění a dekalcifikace v jednom kroku
- Účinnost při nízkých teplotách
- Prevence tvorby biofilmů ve vnitřních okruzích
- Výborná materiálová kompatibilita
- Více než 20 let zkušeností v dialyzačních provozech

Oblast použití

dialox® je určený pro:

- pravidelnou chemickou dezinfekci a dekalcifikaci dialyzačních jednotek a systémů vodních okruhů
- rychlou dezinfekci dialyzačních jednotek mezi jednotlivými pacienty
- dezinfekci hydrauliky, okruhů a generátorů dialyzačních jednotek při odstavení nebo pozastavení dialyzační jednotky
- zabránění růstu biofilmu ve vnitřních okruzích

Účinnost

Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

dialox® je určený k přímému použití. Dávkování si zajišťuje automaticky dialyzační přístroj dle doporučení výrobce dialyzační jednotky. Postupujte dle návodu na použití uvedeného na obale. Reziduální kontrolu provádějte pomocí testovacích proužků dle operačního manuálu dialyzační jednotky.

CE 0297



Složení

100 g dialox® obsahuje následující aktivní látky:

- 6,9 g peroxid vodíku
- 3,6 g kyselina octová
- 0,4 g kyselina peroctová

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveno
Forma	kapalný
Hustota	1,03 g/cm ³ / 20 °C
pH	1,4 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte dialox® s jinými výrobky, především s aldehydovými nebo halogenovými deriváty. Při práci s přípravkem používejte ochranné pracovní pomůcky a zajistěte dostatečné větrání.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Dialox 5 l	1/Kanistr	104104

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Bioxal SA
Route des Verennes 71100
Chalon Sur Saone
Francie