

schülke →



Kyselé koncentrovaný změkčovač vody bez obsahu tenzidu, určený pro mytí a chemotermický reprocessing podložních mís a močových lahví.

Odstraňuje
vodní kámen

thermosept® SKS

Naše Plus

- Odstraňuje nánosy vodního kamene a zabraňuje jeho opětovnému vzniku
- Nepěňivý a biologicky odbouratelný
- Po zaschnutí nezanechává skvrny
- Výborná materiálová kompatibilita s nerezem, hliníkem i plasty

Oblast použití

Tekutý koncentrovaný přípravek **thermosept® SKS** je vhodný na chemotermický reprocessing podložních mís a močových lahví. Výrobek je vhodný pro všechny úrovně tvrdosti vody. Prevence zanášení vodním kamenem. Také předchází kalcifikaci v parních sterilizátorech a zvyšuje čistící účinnost.

Návod na použití

Dávkování:

0,01% na 1 ° dH (odpovídá tvrdosti vody 0,18 mmol / l), což odpovídá dávce 0,1 až 0,3% (1 - 3 ml / l vody). Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla v mycím automatu nebo dezinfektoru. V případě, že je na topném tělese velké množství vápenitých usazenin, doporučujeme před použitím **thermosept®u SKS** provést odvápnění. **thermosept® SKS** zabraňuje vzniku vodního kamene v parním generátoru i při použití s tvrdou vodou. Aby se zabránilo tvorbě vodního kamene, měla by se vkonávat pravidelná údržba. Před použitím se ujistěte, zda je dávkovací čerpadlo odolné proti kyselinám. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

CE



Složení

Změkčovač, inhibitor koroze, organické kyseliny

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,08 g/cm ³ / 20 °C
pH	1,3 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	> 100 °C

Zvláštní upozornění

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Skladujte při pokojové teplotě v originálním obale.

Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Thermosept SKS SOKA 5 l	1/Kanistr	145803
Thermosept SKS 5 l	1/Kanistr	145806

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com