

schülke -†



Alkalický tekutý čisticí přípravek pro strojový reprocessing chirurgických nástrojů, flexibilních endoskopů a laboratorního vybavení

**Silný mycí
účinek**

thermosept® alka clean forte

Naše Plus

- Výborná materiálová kompatibilita
- Široká škála použití
- Použití možné také na předměty z hliníku
- Dokonalé mycí vlastnosti
- Minimalizuje možnost přenosu prionů CJD (dle doporučení RKI)

Oblast použití

Pro čištění chirurgických, mikrochirurgických a MIS nástrojů, rigidních a flexibilních endoskopů, anestetického vybavení, kontejnerů a pásových systémů. Výborně odstraňuje proteiny a minimalizuje riziko přenosu prionů CJD (dle doporučení RKI).

Návod na použití

Dávkování:

Doporučená koncentrace 0,5% (5 ml/l) v závislosti na stupni znečištění zvolit v rozpětí 0,3-1 % (3-10 ml/l).

Po cyklu čištění pomocí **thermosept® alka clean forte** je doporučena neutralizace pomocí přípravku **thermosept® NKZ**. Koncentrace, doba čištění a teplota jsou závislé na míře znečištění nástrojů. Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla v mycím automatu nebo dezinfektoru. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků. Na oplach, i v průběhu reprocessingu, doporučujeme použití měkčené, nebo demineralizované vody.



thermosept® alka clean forte

Složení

< 5 % neionogenní povrchově aktivní látky, < 5 % anionaktivní povrchově aktivní látky, < 5 % NTA a jeho soli, < 5 % polykarboxyláty, enzymy.

Další složky: rozpouštědla, inhibitory koroze

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	téměř bezbarvý
Dynamická viskozita	cca. 3 mPa*s / Metoda : ISO 3219
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,08 g/cm ³ / 20 °C / 1.013 hPa
pH	12 - 12,8 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	> 70 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Přípravek **thermosept® alka clean forte** nemíchejte s kyselinami. Uchovávejte v originálním, těsně uzavřeném obalu při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.

Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Thermosept alka clean forte 10 kg	1/Kanistr	147302
Thermosept alka clean forte 5 kg	1/Kanistr	147301
thermosept alca clean forte 20l	1/Kanistr	147308

Související přípravky

- thermosept® NKP
- thermosept® NKZ

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický přípravek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com