



Biocid

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi KAS, aminu a fenoxyetanolu určený pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů ve zdravotnictví, potravinářství a komunální hygieně.

desam® effect

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Účinný od 0,25%
- Nedráždí dýchací cesty
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Vhodný také do potravinářství a nemocničních kuchyní
- Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem schülke wipes

Oblast použití

desam® effect je určený k dezinfekci a mytí ploch, povrchů a prostor se zvýšeným rizikem růstu bakterií, mikroskopických vláknitých hub a plísní. Je vhodný pro použití ve všech oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně (kosmetické a tatoo salóny, fitness centra, školní zařízení, atd.), v institucích a také v potravinářství.

Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Účinnost

Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desam® effect se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20 - 25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé

voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit.



Složení

100 g přípravku **desam[®] effect** obsahuje následující aktivní látky:

- 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium chlorid
- 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
- 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 3 g Didecylidimethylamonium chlorid

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Plochy a předměty, které byly ošetřeny směsí a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, kůže a neošetřené dřevo, barevně nestabilní a porézní materiály. Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam Effect 1 l FL	12/Karton	70002050
Desam Effect 5 l KA	1/Kanistr	70002051



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Životní prostředí

Společnost schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Společnost Schulke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com