

# schülke -†



Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek na bázi KAS, aminu a fenoxyetanolu pro ruční čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků a ploch a povrchů ve zdravotnictví a komunální hygieně.

účinný od  
0,25%

## desam<sup>®</sup> effekt +

### Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Nedráždí dýchací cesty
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Kompatibilní se systémem suchých utěrek schülke wipes

### Oblast použití

**desam<sup>®</sup> effekt +** je určený k čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný pro použití ve zdravotnictví a komunální hygieně k dezinfekci ploch a povrchů. Produkt je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty. Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

### Účinnost

Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

### Návod na použití

Pracovní roztok se připraví naředěním koncentráту desam<sup>®</sup> effekt + ve vodě o teplotě 20 °C -25 °C. Roztok se aplikuje otřením. Dbejte na důkladné smočení povrchu zdravotnického prostředku. Není určen k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Nepřekračujte dobu expozice.

CE 1023



## Složení

100 g přípravku **desam<sup>®</sup> effekt +** obsahuje následující aktivní látky:

- 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium chlorid
- 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
- 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 3 g Didecylidimetylamonium chlorid

## Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na barevné kovy (měď, mosaz), nelegované oceli, barevně nestabilní materiály, silikony a polykarbonáty. Skladovat v originálních, dobře uzavřených původních obalech v suchých prostorách.

Doba expirace: 24 měsíců

## Související přípravky

- antifect<sup>®</sup> extra
- terralin<sup>®</sup> protect

## Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek, biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com