

schülke -+



Bezdotykový dávkovač dezinfekčních a mycích prostředků. Vhodný k montáži na stěnu i stojan.

Präparatespender RL1 Touchless

Naše Plus

- Vhodné pro 500 ml i 1 l lahve Schülke
- Lze namontovat na stěnu nebo na kompatibilní stojan
- Včetně odkapávací misky
- Umístění lahve v dávkovači dnem vzhůru umožňuje dokonalé vyprázdnění
- Jednoduché nastavení 1 nebo 2 dávek (1,5 ml - 3 ml)

Oblast použití

Snadné dávkování dezinfekčních prostředků na ruce (tekuté i gelové), mycích přípravků i pečujících krémů. Bezdotykový dávkovač RL1 je uzamčený a lze jej otevřít pouze klíčem. Láhev se vyměňuje po otevření krytu. Vyjme se prázdná láhev, sejme se nástavec pumpy a našroubuje se na novou láhev, která se pak vloží dnem vzhůru do dávkovače. Snadné nastavení dávkovaného množství: Při otevřeném víku můžete stisknutím tlačítka nastavit, zda se na jedno spuštění aktivuje jedna dávka (1,5 ml) nebo dávky dvě (3 ml) (stisknutí jednou: 1 dávka, stisknutí dvakrát: 2 dávky). Dávkovač se montuje přímo na stěnu nebo na držák dávkovače na stojanu (šrouby a hmoždinky jsou součástí dodávky). Dávkovač RL1 lze snadno a bezpečně dezinfikovat - např. pomocí produktu mikrocid® AF. Pro hygienické použití doporučujeme pravidelně vyměňovat nástavec pumpy (např. čtvrtletně) v závislosti na použití. Díky průhlednému krytu lze snadno kontrolovat množství tekutiny v lahvi.

Rozměry dávkovače (bez odkapávací misky) : V 318 x Š 154 x H 108 mm



Präparatespender RL1 Touchless

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Universal Dispenser RL1 Touchless	1/Kartón	60000464



Společnost Schulke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.



Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schulke.com