



Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in allen Bereichen von Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen.

schülke wipes

Unser Plus

- umfassend einsetzbar
- einfache Handhabung
- Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage
- flusenfrei auf der Oberfläche
- 40, 70, 100 oder 111 Tücher pro Rolle
- Medizinprodukt

Anwendungsgebiete

Tücher zur Tränkung mit ausgewählten Desinfektionsmitteln. Je nach Auswahl der Produkte eignet sich das gebrauchsfertige Feuchttuchspendersystem zur Reinigung oder Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, insbesondere in Bereichen mit Anspruch auf hygienische Sicherheit.

Anwendungshinweise

Befüllung unter hygienischen Bedingungen

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Öffnen Sie den Deckel des Feuchttuchspenders und setzen Sie die entpackte Vliesrolle ein. Bei Verwendung von Flächendesinfektionsmittelkonzentraten werden 3 l der entsprechenden Gebrauchslösung, und bei gebrauchsfertigen Produkten 2 l Tränkmenge für die schülke wipes 100 / 111 bzw. je 1,5 l für die schülke wipes 40 / 70 benötigt. Verwenden Sie hierzu nur die von schülke empfohlenen Präparate und Konzentrationen. Beachten Sie dazu bitte die jeweilige Präparate-Information.

Kombinierbare Gebrauchslösungen:

Desinfektionsreiniger AF, perform® classic conc. Q-Plus, terralin® protect, TPH protect.

Kombinierbare gebrauchsfertige Lösungen:

antifect® N liquid, buraton® rapid, mikrozyd® AF liquid, mikrozyd® sensitive liquid, perform® advanced alcohol EP, perform® classic alcohol EP

Bei sensiblen Medizinprodukten und Oberflächen, die nicht alkoholverträglich sind (z. B. Polster, Displays, Acrylglas, Ultraschallköpfe), empfehlen wir Ihnen die Tränkung der Tücher mit unserem mikrozyd® sensitive liquid. Ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels ein und setzen Sie den Deckel fest auf den Spender auf. Die Tücher sind spätestens nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt und dann gebrauchsfertig.

Dokumentieren Sie in der Zwischenzeit, wie auch bei jeder Nachbefüllung, den Präparatenamen, die gewählte Einsatzkonzentration, die Einwirkzeit und das Befülldatum auf dem Etikett, welches jeder Vliestuchrolle beiliegt. Kleben Sie es auf das vorgesehene Feld.

Reinigung und Desinfektion

Bitte achten Sie beim Wischen mit den getränkten Tüchern auf eine vollständige Benetzung der Flächen und nach jeder Tuchentnahme auf ein sorgfältiges Verschließen der Entnahmeöffnung, um einer Austrocknung der Tücher vorzubeugen.

Wiederbefüllung unter hygienischen Bedingungen

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender zu reinigen und zu desinfizieren. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter www.schuelke-wipes.de



schülke wipes

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
schülke wipes 70 ST RO	6/Karton	70003345
schülke wipes 100 ST RO	6/Karton	70003346
schülke wipes 111 ST RO	6/Karton	70003347
schülke wipes 100/111 Spend.box 1 ST EM	5/Karton	70003210
schülke wipes mini Feuchttuchsp. 1 ST EM	5/Karton	70003211
schülke wipes Feuchttuchsp. 1 ST EM	5/Karton	70003212
schülke wipes 70 Spenderbox 1 ST EM	5/Karton	70003214
schülke wipes 40 ST RO	10/Karton	70003344
schülke wipes 100/111 Spenderbox (eckig) 5 Stk.	1/Karton	70000161

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
antifect N liquid 1 I FL	113940
antifect N liquid 5 I KA	113941
buraton rapid 1 I FL	113911
Desinfektions-Reiniger AF 5 I KA	120702
mikrozyd AF liquid -INT- 1 I FL	109301
mikrozyd AF liquid -INT- 5 I KA	109166
perform advanced alcohol EP 1 I FL	121804
perform classic alcohol EP 1 I FL	113908
perform classic conc. Q-Plus 2 I FL	70000185
perform classic conc. Q-Plus 5 I KA	70000184
terralin protect 2 I FL	181604
terralin protect 5 I KA	181612
TPH protect 2 I FL	181701
TPH protect 5 I KA	181702
Wandhalterung VA schülke wipes	134430

Verwandte Produkte

- schülke wipes safe&easy

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com