

schülke -†



Kraftvoller, alkalischer Schnellreiniger mit breitem Anwendungsspektrum zur manuellen Aufbereitung.

edisonite® classic

Unser Plus

- optimales Reinigungsergebnis schon bei geringer Anwendungskonzentration
- gute Materialverträglichkeit
- löst selbst hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Eiweiß, Öl, Blut, Fett, Wachs und Silikon)
- schützt nachhaltig vor Korrosionsschäden
- frei von Ätzalkalien und Chlorverbindungen

Anwendungsgebiete

- Pulverpräparat zur kraftvollen Reinigung von medizinischen Instrumenten, Laborgeräten, technischen Anlagen und Gegenständen aus Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Quarz, Porzellan und Keramik
- eignet sich hervorragend für den Einsatz im Ultraschallbad

Anwendungshinweise

edisonite® classic, je nach Grad der Verschmutzung, möglichst mit warmem Wasser ansetzen. Die erforderliche Menge mit einem Messbecher entnehmen.

Normale Verschmutzung: 0,5 %ig (5 g/l Wasser)

Stärkere Verschmutzung: 1,0 %ig (10 g/l Wasser)

Einwirkzeit: 10 - 20 Min.

Zu reinigende Gegenstände nach Gebrauch vollständig in die Gebrauchslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach der Reinigung das Instrumentarium gründlich mit Wasser von mindestens Trinkwasserqualität, besser mit sterilem aqua dest. oder vollentsalztem Wasser abspülen/durchspülen, um Rückstände der Reinigungslösung vollständig zu entfernen.

Ein optimiertes Reinigungsergebnis wird durch Erwärmen der Gebrauchslösung erzielt. Eloxiertes Aluminium und Zink (sind auf Verträglichkeit zu prüfen): Temp. < 60°C

Um Proteindenaturierungen zu vermeiden:

Proteinverschmutzungen: Temp. < 45°C

Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller.



Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004: > 30 % Phosphate, < 5

% anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside

Weitere Inhaltsstoffe: Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	grün
Flammpunkt	Keine Daten verfügbar
Form	Kristallines Pulver
pH	11,8/ 10 g/l / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Nicht anwendbar

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
edisonite classic 5 kg EM	1/Eimer	70003063

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter

www.schuelke.com. Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com