



Ausschließlich als Schulungsmaterial zum Testen von Handschuhdichtigkeit.

schülke optics lotion

Unser Plus

- fluoreszierende Lotion zur Überprüfung der Handschuhdichtigkeit
- zeigt unter UV-Licht die Durchlässigkeit von Handschuhe an

Anwendungsgebiete

Ausschließlich als Schulungsmaterial zum Testen von Handschuhdichtigkeit.
Nicht als Pflegelotion verwenden.

Produkteigenschaften

Fluoreszierende Lotion ausschließlich als Schulungsmaterial zum Testen von Handschuhdichtigkeit.

Anwendungshinweise

Handschuhe anziehen. Handschuhe mit schülke optics lotion, wie bei der hygienischen oder chirurgischen Händedesinfektion, einreiben. Handschuhe ausziehen. Hände unter eine UV Lampe (366 nm) halten. Dort, wo die Handschuhe Löcher aufweisen, dringt schülke optics lotion ein. Die Stellen, die mit der Lotion in Kontakt kommen leuchten und zeigen so die Durchlässigkeit der Handschuhe an.



schülke optics lotion

Produktdaten

Zusammensetzung: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Cera Alba, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Stilbene Derivative, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,98 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	weiß
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	Emulsion
pH	ca. 5,0 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	ca. 1.000 mPa*s / 20 °C / Methode : DIN 53019

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
schülke optics lotion 500 ml FL	20/Karton	70000944

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Dosierpumpe für 500 ml / 1 L	180303

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.at.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com