

Gebrauchsanweisung: mikrozid® sensitive Tücher / liquid / wipes premium Qualität. Sicherheit. schülke.



Indikationen:

Reinigungs- und Desinfektionstücher für Arbeitsflächen und medizinische Geräte

- strapazierfähig und gut imprägniert, kein Zerreißen, kein Zusammendrehen der Tücher
- gute Benetzung der Oberflächen

Anwendungsmethoden /-hinweise: mikrozid® sensitive Tücher

- mit einem ersten Desinfektionstuch reinigen. Auf vollständige Benetzung aller Oberflächen achten
- Vorgang mit einem zweiten Tuch, diesmal zur Desinfektion, wiederholen. Trocknen lassen
- Behälter mikrozid® sensitive Tücher mit 200 Stück nachfüllbar

mikrozid® sensitive liquid

- unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen
- auf vollständige Benetzung achten

Normierung:

- wirksam gegen Bakterien (inkl. Tb) und (C. albicans) (geprüft nach DGHM-Richtlinien)
- begrenzt viruzid*, HIV, HBV, HCV, Rota, Papova- und Noroviren (30 Minuten)
- wirksam gegen Bakterien und Pilze innerhalb 1 Minute
- VAH / DGHM-gelistet
- Packmittel recyclingfähig

* gem. RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

[CE 0297]



Schritt 1

Zum Schutz der Haut Handschuhe anziehen.

mikrozid® sensitive Tücher



Schritt 2

Tuch aus der Dose nehmen und Oberfläche mit getränktem Tuch gründlich wischen, um sie zu reinigen und zu desinfizieren.



Schritt 3

Auf vollständige Benetzung achten. Zur Anwendung auf besonders großen Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.



Schritt 4

Für eine optimale Wirkung trocknen lassen, bis die Lösung sich vollständig verflüchtigt hat.



Schritt 5

Nachfüllpack oben aufschneiden und kompletten Beutel in die Dose einsetzen. Sticker mit Verfallsdatum und Chargennummer vorher abziehen und auf die Dose kleben.

mikrozid® sensitive liquid



Schritt 2

Mit schülke wipes oder Einmaltuch. Desinfektionsmittel unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen. Einwirken und trocknen lassen.



Schritt 3

Verschmutzte Oberfläche:

Technik: Aufbringen – Wischen – Aufbringen

Überschüssige Präparatemengen mit einem ungefärbten Einmaltuch entfernen. Trocknen lassen.