

schülke -+



Alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen.

perform® classic alcohol EP

Unser Plus

- schnell und effektiv
- gebrauchsfertig
- farbstoff- und parfümfrei
- Euro-Normen geprüfte Wirksamkeit

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Flächen in Bereichen, in denen eine schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist.

Anwendungshinweise

perform® classic alcohol EP ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt angewendet. Flächen, Anlagen oder Arbeitsgeräte vollständig benetzen und einwirken lassen. Das Präparat trocknet von der behandelten Oberfläche schnell ab. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit Einmaltuch entfernen. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid <i>EN1276, EN13697</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid <i>EN1650, EN13697</i>	gebrauchsfertig	2 Min.
begrenzt viruzid <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	gebrauchsfertig	30 Sek.



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe folgende
Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	0,890 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	5,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Nitrilkautschuk) wird empfohlen.

BAuA Reg.-Nr. N-30996/ N-31007

Schweizer Zulassung: CHZN0736

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform classic alcohol EP 1 l FL	10/Karton	113908
perform classic alcohol EP 10 l KA	1/Kanister	113909
perform classic alcohol EP 200 l FA	1/Fass	113910

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat perform[®] classic alcohol EP vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com