

schülke -†



Sporizide Wischtücher auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen aller Art.

mikrocid[®] PAA wipes

Unser Plus

- sporizid in nur 5 Minuten
- nach Öffnung 28 Tage haltbar
- sofort einsetzbar - keine Aktivierung notwendig
- besonders grosses Tuchformat 20 x 30 cm

Anwendungsgebiete

Das Produkt ist geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Das Produkt bietet mit der einmaligen oxidierenden Kraft der Peressigsäure eine sporizide Wirksamkeit für den Ausbruchsfall. Aufgrund ihres grossen Wirkspektrums und der kurzen Einwirkzeit sind die mikrocid[®] PAA wipes die idealen Desinfektionstücher für den Einsatz in Bereichen, in denen ein besonders grosses Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen besteht. Beispiele sind u. a. Isolierzimmer, OP-Bereiche, Intensivstationen, die unreine Seite in der ZSVA/ Endoskopie oder auch die Neonatologie. Patientennahe Flächen und Flächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt stehen im Fokus der Anwendung.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
tuberkulozid EN14348 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
levurozid EN13624, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid EN13624 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
begrenzt viruzid PLUS EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
viruzid EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
Clostridium difficile EN17126 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.

Listungen

- IHO-Liste
- VAH-Zertifikat



Produkt Daten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe folgende
Wirkstoffe: 0,06 % Peressigsäure
weitere Inhaltsstoffe: Wasserstoffperoxid, Essigsäure

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,03 g/cm ³ / 20 °C / der Wirkstofflösung
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 104 °C / Methode: ISO 3679 / GLP: ja / der Wirkstofflösung
Form	Wässrige Lösung auf Vliesstoff
pH	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	1 mPa*s / 20 °C / der Wirkstofflösung

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Behälter dicht geschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verpackung nur vollständig restentleert der Wrtstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab (max. 3,5 m² bei der Flächendesinfektion). Nicht auf Buntmetallen verwenden und nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich.

BAG-RegNr.: CHZN3512

Anwendungshinweise

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkautschuk) ist unbedingt notwendig. Die Fläche mit getränktem Tuch gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Achten Sie beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuches auf hygienische Aspekte. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Zur Anwendung auf grösseren Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden. Nicht auf Buntmetallen verwenden und nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. schülke garantiert nach Anbruch der Verpackung und bei Einhaltung der Anweisungen eine Haltbarkeit von 28 Tagen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid PAA wipes -INT- 50 ST DS	10/Karton	70003205
mikrozid PAA wipes -INT- 50 ST DS	10/Karton	128101

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Wandhalterung Jumbodose	134421

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat mikrozid[®] PAA wipes vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com