



octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel zur präoperativen Dekontamination der Haut, Haare und Nasenvorhöfe

## octenisan® Set

### Unser Plus

- octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel zur präoperativen Dekontamination im praktischen Set
- Für eine Anwendung von bis zu 5 Tagen vor der Operation
- Gibt Sicherheit: Umfangreiche Patienteninformation für eine sichere Anwendung der Produkte und zur Erhöhung der Compliance
- Schafft Vertrauen: Für das gute Gefühl des Patienten, in besten Händen zu sein.

### Anwendungsgebiete

#### Präoperative Ganzkörperdekontamination

Aktuelle Studien zeigen, dass dekontaminierende Ganzkörperwaschungen, sei es präventiv, auf Intensivstationen oder präoperativ, wesentlich zur Reduktion von Infektionen beitragen können. Untersuchungen zeigen ausserdem, dass die nasale Besiedelung durch *S. aureus* eine besondere Rolle für das spätere Infektionsgeschehen spielt. Ein Bündel verschiedener Massnahmen kann erfolgreich zur Reduktion bzw. Vermeidung nosokomialer Infektionen führen.<sup>1</sup>

### Produkteigenschaften

#### octenisan® Waschlotion:

- zur Ganzkörperwaschung (inkl. Haarwaschung) z. B. bei MRE
- mit ausgesuchten Pflegesubstanzen und hautmilden Tensiden für alle Hauttypen geeignet, auch bei Seifenüberempfindlichkeit, bzw. allergieempfindlicher Haut
- besonders schonend durch einen hautneutralen pH-Wert
- farbstoff- und parfümfrei

#### octenisan® md Nasengel (CE0297):

- Dekontamination der Nasenvorhöfe durch physikalische Reinigung
- zur unterstützenden Wundbehandlung bei Läsionen des Nasenepithels

- zur Befeuchtung

### Anwendungshinweise

Das octenisan® Set kann dem Patienten vor der Operation übergeben bzw. zum Privatkauf in der Apotheke empfohlen werden. Die octenisan® Waschlotion und das octenisan® md Nasengel sollte der Patient bereits bis zu 5 Tage vor der Operation anwenden.

#### octenisan® Waschlotion (bis zu 5 Tage lang 1x täglich):

- Haare und Körper vollständig befeuchten.
- Die Waschlotion unverdünnt auf einen feuchten und frischen Waschlappen auftragen.
- Die Waschlotion gleichmässig auf den gesamten Körper auftragen. Dabei besonders auf die Achseln achten. Kontaktzeit von 1 Minute beachten.
- Gründlich abwaschen. Mit einem frischen Handtuch abtrocknen.
- Jedes Mal: Frische Kleidung anziehen.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

#### octenisan® md Nasengel (bis zu 5 Tage lang 2x täglich):

- Ausreichend Nasengel auf einen Watteträger auftragen.
- Das Gel auf die Flächen der Nasenvorhöfe auftragen.
- Das Gel durch seitliches Zusammendrücken der Nasenflügel verteilen. Überschüssiges Gel entfernen.

octenisan® md Nasengel darf nicht zu tief in die Nase eingebracht werden. Nicht für Kinder unter 1 Jahr geeignet.



# octenisan® Set

## Produktdaten

### Zusammensetzung octenisan® Waschlotion:

Aqua, Cocamidopropylamine Oxide, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Lactic Acid, Octenidine HCl, Allantoin.

### Zusammensetzung octenisan® md Nasengel:

Purified water, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine HCl

## Besondere Hinweise

Wenden Sie octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe an. Nur zur äusserlichen Anwendung. Nicht in Kombination mit PVP-Jod anwenden, da dies zu Verfärbungen und Einschränkung der antiseptischen Wirkung des PVP-Jod führen kann.

Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden.

### octenisan® Waschlotion:

Die Anwendung von Pflegeprodukten ist nach Abtrocknung des Produktes möglich.

### octenisan® md Nasengel:

Tube bei Raumtemperatur aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
octenisan set 2.0	10/Karton	70003054

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zu unseren Octenidin-haltigen Produkten finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

<sup>1</sup>Bode L *et al.*, (2010) Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carriers of *Staphylococcus aureus*, N Engl J Med, 362, S. 9-17.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)