



schulke -+

Das hyclick®-System Nachrüstset besteht aus zwei Teilen:



hyclick® Flaschenzentrierer



hyclick® Haube



Das Nachrüstset für das hyclick®-System können Sie in zwei Ausführungen bestellen.

hyclick®-System Nachrüstset für manuellen Europender Plus (z. B. ingo-man® plus, KHK, KHL)	Art.-Nr.
Karton mit 6 x hyclick®-Nachrüstset 500 ml	60000485
Karton mit 6 x hyclick®-Nachrüstset 1 l	60000486

Dazu passen: hyclick®-Einwegflaschen für die Händedesinfektion und -reinigung



Händedesinfektion

desderman® care hyclick®-Flasche

Art.-Nr.

Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick® 70002335
Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick® 70002341



Händereinigung

sensiva® wash lotion hyclick®-Flasche

Art.-Nr.

Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick® 70000138
Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick® 70000137



Händedesinfektion

desmanol® pure hyclick®-Flasche

Art.-Nr.

Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick® 70000817
Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick® 70001795



Händereinigung

esemtan® wash lotion hyclick®-Flasche

Art.-Nr.

Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick® 70000134
Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick® 70000133

- www.linkedin.com/company/schulke-schweiz
- www.youtube.com/schuelkeChannel
- www.facebook.com/myschulke

Schülke & Mayr AG
 Hungerbüelstrasse 22 | 8500 Frauenfeld | Schweiz
 Tel. +41 44 466 55 44
 mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.ch

Sie möchten sich ausführlich zum hyclick®-System beraten lassen? Kontaktieren Sie uns!

- +41 44 466 55 44
- mail.ch@schuelke.com

ANLEITUNG

Zwei Teile sind im Nachrüstset enthalten:



(A) hyclick®-Haube



(B) hyclick®-Flaschenzentrierer



Vorbereitung



1 Entnehmen Sie zuerst die leere Flasche.



2 Um die bestehende Pumpe auszubauen öffnen Sie die Haube.



3 Auf der rechten Seite sehen Sie eine Entriegelungstaste «Push». Diese muss gedrückt werden, um die Pumpe herauszuziehen.



4 Schliessen Sie die Haube und ziehen Sie im Anschluss die Haltestange mit einer Hand in Richtung Spenderfront.



5 Haken Sie die Haube mit der anderen Hand nach unten und dann nach vorne aus. Jetzt kann das hyclick®-Nachrüstset eingebaut werden.




Video:
So einfach rüsten Sie Ihre Spender um


Einbau




6 Zuerst muss der Flaschenzentrierer eingesetzt werden. Halten Sie diesen am Besten nach unten geneigt und stützen Sie das Endstück mit Ihrem Zeigefinger.

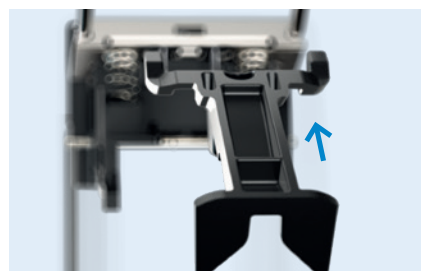

7 Der Flaschenzentrierer kann jetzt über die Führungsschienen eingeschoben werden.

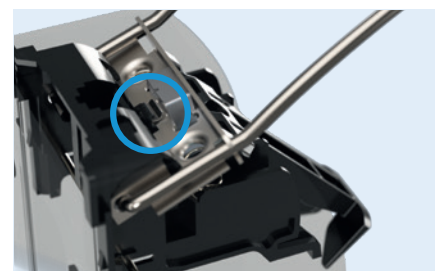

8 Durch Druck nach unten haken Sie die Metallklammer in die hintere Verkleidung im Spender ein.

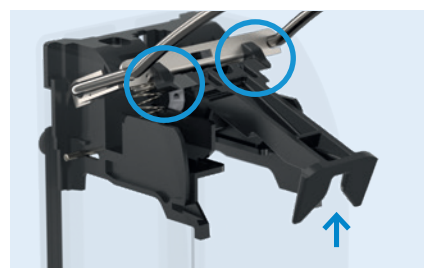

9 Im Anschluss muss der Flaschenzentrierer einrasten indem die Zapfen vor die Metallblende geschoben werden.



10 Jetzt kann die hyclick®-Haube montiert werden. Dafür den Schlitten der Haube in die Aufnahmeschiene der alten Pumpe einschieben bis es klickt.



11 Abschliessend die neue Flasche einsetzen. Beachten Sie die rote Erstanbruchsicherung vorher zu entfernen. Fertig!