



Alkoholische Schnelldesinfektion von Flächen*.

kodan® (N) wipes

Unser Plus

- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- rückstandsfrei
- gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete

Das Produkt ist geeignet zur Desinfektion von Flächen. (PT2)

Anwendungshinweise

Die Fläche mit dem Tuch gründlich wischen und die Wirkstofflösung einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberflächen ab. Beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuchs auf hygienische Aspekte achten. Nach Gebrauch auf das Schließen des Deckels achten.

Wiederbefüllung der Dose

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Aufkleber mit Haltbarkeitsdatum auf Spenderdose übertragen. Deckel aufdrehen, Nachfüllbeutel komplett in die Spenderdose stellen (ggf. zuvor passgerecht formen) und Beutelrand abschneiden. Das vorgezupfte Tuch aus der Rollenmitte ziehen, von unten in den dafür vorgesehenen Führungsschlitz im Deckel einfädeln und durchziehen. Deckel desinfizieren und verschrauben. Für Hochrisikobereiche empfiehlt schülke, auf den Einsatz von Nachfüllbeuteln zu verzichten. **Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt.**

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
bakterizid gemäß VAH - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
tuberkulozid EN14348 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid gemäß VAH	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid EN13624 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid EN13624 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	2 Min.
begrenzt viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	30 Sek.
Norovirus EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
Norovirus gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	1 Min.
Rotavirus gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	30 Sek.
Adenovirus (Typ 5) gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	5 Min.



kodan[®] (N) wipes

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 24,75 g Ethanol (94% w/w), 35 g Propan-1-ol
Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:
Duftstoffe

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C / der Wirkstofflösung
Farbe	farblos
Flammpunkt	27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / der Wirkstofflösung
Form	fest Wässrig-alkoholische Lösung auf Vliesstoff
pH	Nicht anwendbar

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

* ausgenommen Medizinprodukte

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen (außer Acrylglas und alkoholempfindlichen Lacken). Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden. Bitte beachten Sie den Brand- & Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR Regel "Desinfektionsarbeit im Gesundheitswesen". Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. schülke garantiert, bei entsprechender Handhabung, nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von 3 Monaten.
BAuA-Nr.: N-76918

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
kodan [®] (N) wipes refill (20 x 90 wipes)	20/Karton	70002035 PZN: 14306671
kodan [®] (N) wipes (10 x 90 wipes)	10/Karton	70002034 PZN: 14306665

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Wandhalterung für Spenderdose (klein)	134417

Verwandte Produkte

- mikroqid[®] AF wipes
- mikroqid[®] sensitive wipes
- mikroqid[®] universal wipes premium



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com