

Nachrüstset für den Einbau in manuelle Eurospender der Plus-Serie zur Aufnahme von hyclick®-Flaschen.

hyclick® Nachrüstset

Unser Plus

- Kompatibel mit manuellem Eurospender Plus
- Maximale Hygiene ohne Aufbereitung
- Schneller Flaschenwechsel mit nur einem "Click"
- Flexibler Einsatz von hyclick®- oder Euroflaschen
- Verfügbar für 500 ml- und 1.000 ml-Spender

Beschreibung

Das innovative hyclick®-System lässt sich nun auch in den weit verbreiteten Eurospender Plus einsetzen. Unser Nachrüstset macht es möglich: Mit nur zwei kleinen Bauteilen können Sie Ihre vorhandenen Standardspender umrüsten - mit wenigen Handgriffen, ganz ohne Werkzeug.

Anwendungshinweise

Das hyclick®-Nachrüstset wird einfach in den bestehenden Spender eingebaut. Dabei bleiben Sie völlig flexibel: Bei Bedarf können Sie jederzeit wieder auf Euroflaschen umstellen. Eine Anleitung zum Einbau sowie eine Übersicht zu allen kompatiblen Spendern finden Sie auf unserer Webseite.

Produktwechsel


Beim Produktwechsel ist nur die Einwegflasche auszutauschen. In Kombination mit den hyclick®-Flaschen ist der Spender aufbereitungsfrei.

Lieferformen

Das Nachrüstset für das hyclick -System können Sie in zwei Ausführungen bestellen.

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
hyclick®-Nachrüstset 500 ml	6/ Karton	60000485
hyclick®-Nachrüstset 1 l	6/ Karton	60000486

Die folgenden Produkte sind aktuell in hyclick® Varianten verfügbar

Produkt	Lieferform	Art.-Nr.
 desderman® 1.000 ml desderman® 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70001089 70001093
 desmanol® care 1.000 ml desmanol® care 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70001086 70001085
 sensiva® wash lotion 1.000 ml sensiva® wash lotion 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70000137 70000138
 esemtan® wash lotion 1.000 ml esemtan® wash lotion 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70000133 70000134



ANLEITUNG

für den Einbau des hyclick®-Nachrüstsets,
passend für alle manuellen Eurospender plus*.

Zwei Teile sind im
Nachrüstset enthalten:



(A)
hyclick®-
Haube



(B)
hyclick®-
Flaschen-
zentrierer



Vorbereitung




1 Entnehmen Sie zuerst die leere Flasche.



2 Um die bestehende Pumpe auszubauen öffnen Sie die Haube.



3 Auf der rechten Seite sehen Sie eine Entriegelungstaste „Push“. Diese muss gedrückt werden, um die Pumpe herauszuziehen.

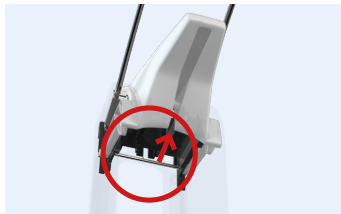

4 Schließen Sie die Haube und ziehen Sie im Anschluss die Haltestange mit einer Hand in Richtung Spenderfront.




5 Haken Sie die Haube mit der anderen Hand nach unten und dann nach vorne aus. Jetzt kann das hyclick®-Nachrüstset eingebaut werden.




Video:
So einfach
rüsten Sie Ihre
Spender um

www.hyclick.com


Einbau

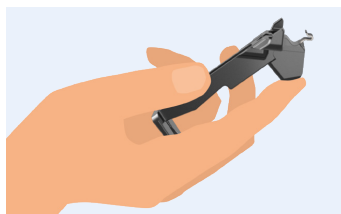


6 Zuerst muss der Flaschenzentrierer eingesetzt werden. Halten Sie diesen am Besten nach unten geneigt und stützen Sie das Endstück mit Ihrem Zeigefinger.

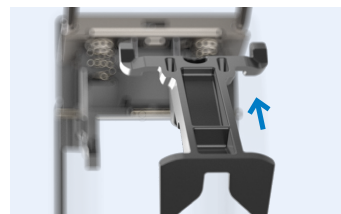

7 Der Flaschenzentrierer kann jetzt über die Führungsschienen eingeschoben werden.

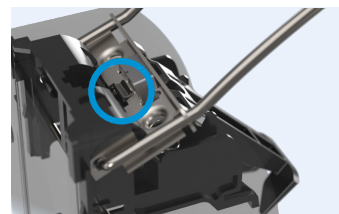

8 Durch Druck nach unten haken Sie die Metallklammer in die hintere Verkleidung im Spender ein.

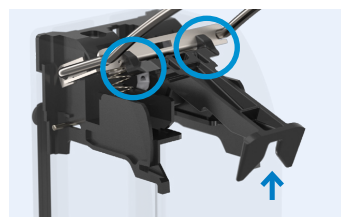

9 Im Anschluss muss der Flaschenzentrierer einrasten indem die Zapfen über die Metallblende geschoben werden.



10 Jetzt kann die hyclick®-Haube montiert werden. Dafür den Schlitten der Haube in die Aufnahmeschiene der alten Pumpe einschieben bis es klickt.



11 Abschließend die neue Flasche einsetzen. Beachten Sie die rote Erstanbruchsicherung vorher zu entfernen. Fertig!

*bspw. KHK/ KHL



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com