



Adoucisseur acide pour le traitement thermique des bassins et des urinaux.

thermosept® SKS

Notre plus

- empêche la formation de dépôts calcaires
- favorise un séchage sans résidu du matériel à laver
- formulation sans mousse
- bonne compatibilité du matériel

Domaines d'utilisation

thermosept® SKS s'utilise pour le traitement thermique des bassins et des urinaux. thermosept® SKS dispose de composants adoucissants spéciaux pour lier la dureté de l'eau et garantit un séchage sans tache du matériel à laver. Ce produit s'utilise pour tout type de dureté de l'eau.

Conseils d'utilisation

Dosage:

0,01 % par 1° fH, soit un dosage de 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 g/l d'eau).

Le dosage est effectué par les pompes de dosage de la machine, dont il faut vérifier la résistance aux acides.

Si le thermoplongeur est déjà très entartré, il est recommandé de procéder à un détartrage avant l'utilisation de thermosept® SKS (p. ex. avec thermosept® NKZ ou thermosept® NKP). thermosept® SKS empêche également les dépôts calcaires dans l'évaporateur en cas d'eau particulièrement dure.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition :

acides organiques, stabilisateur de dureté, inhibiteurs de corrosion

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,08 g/cm ³ / 20 °C
Point d'éclair	> 100 °C
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermosept SKS SOKA 5 kg KA	1/jerrycan	145803
thermosept SKS 5 kg KA	1/jerrycan	145806

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermosept® SKS sur Internet sous www.schuelke.ch



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com