



Lingettes imbibées, prêtes à l'emploi, pour la désinfection des surfaces.

perform[®] classic wipes EP

Notre plus

- rapide et efficace
- particulièrement économique avec 220 (presque taille DIN A4) lingettes Jumbo par boîte
- sans colorant
- Efficacité contrôlée suivant normes européennes

Domaines d'utilisation

Pour la désinfection de surfaces dans les zones où l'efficacité microbologique rapide est exigée.

Conseils d'utilisation

Détacher les lingettes en tirant en oblique vers les bas. Essuyer soigneusement les surfaces avec la lingette imbibée, veiller à une humidification complète et laisser agir. Après utilisation, veiller à ce que le couvercle de la boîte soit bien refermé. Les surfaces particulièrement sensibles à l'alcool, comme le verre acrylique p. ex., ne peuvent pas être traitées avec ce produit.

Efficacité microbologique

Effacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN1276, EN13697	prêtes à l'emploi	1 min
Fongique EN1650, EN13697	prêtes à l'emploi	2 min
activité virucide limitée Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	prêtes à l'emploi	30 sec



perform[®] classic wipes EP

Données relatives au produit

Une boîte contient 220 lingettes imbibées prêtes à l'emploi.
1 g de solution contient :
0,25 g d'éthanol (à 94 %), 0,35 g de propan-1-ol

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,89 g/cm ³ / 20 °C / de la solution active
pH	Non applicable
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1 / de la solution active
Routine FORM	Solution hydroalcoolique sur textile non-tissé
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Remarques particulières

Utilisez les désinfectants avec précaution. Toujours lire les étiquettes et les informations sur le produit avant utilisation.

Ne pas utiliser à proximité de sources d'ignition.

L'utilisation de gants (par ex. en caoutchouc nitrile) est recommandée.

N° d'enregistrement BauA N-30999/ N-31010

Autorisation en Suisse: CHZN0738

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform classic wipes EP 200 ST DS	10/Carton	70000186
perform classic wipes EP 220 ST DS	10/Carton	70003099

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform[®] classic wipes EP sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com