



à utiliser avec octenisept® incolore

Vaginal Applicator

Notre plus


- utilisation simple et discrète
- mouillage optimal de l'épithélium vaginal

Domaines d'utilisation

L'applicateur peut être utilisé avec l'antiseptique octenisept® incolore 50ml.

Conseils d'utilisation

- Avant la première utilisation, retirer l'applicateur (c) de son emballage et sur le flacon de octenisept® incolore après avoir enlevé le capuchon de protection transparent (a) et la tête de pulvérisation (b).
- Le mécanisme de pulvérisation peut être actionné indifféremment de la position du flacon (à l'endroit ou à l'envers).
- Nous vous recommandons d'introduire l'applicateur profondément dans le vagin en étant assise sur la lunette de toilette ou couchée sur le lit. Appuyer 10 fois sur le capuchon de l'applicateur avec l'index, afin de répartir la préparation profondément dans le vagin.
- Après l'utilisation, essuyer l'extérieur de l'applicateur et vaporiser encore fois un peu de la préparation p. ex. au-dessus de lavabo, l'applicateur dirigé vers le bas.
- Vous pouvez maintenant ranger la préparation jusqu'à la prochaine application.
- Avant l'utilisation suivante, vaporiser un à deux jets, l'applicateur dirigé vers le bas, puis procéder au traitement comme décrit.
- L'applicateur peut être utilisé pour la durée d'un cycle de traitement. L'applicateur doit être éliminé après la fin du traitement.

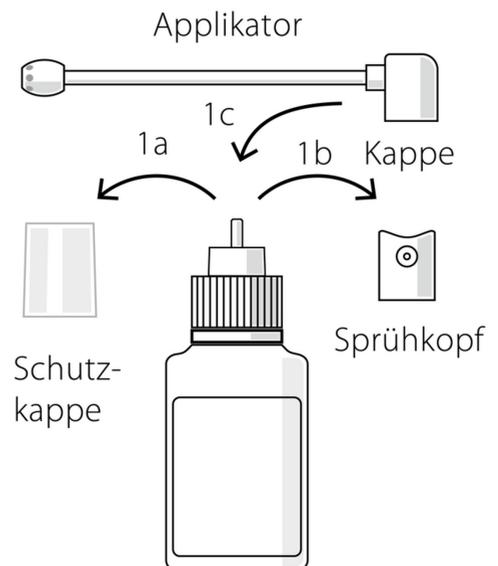

Vaginal Applicator

Remarques particulières

Veillez lire la notice d'octenisept® incolore.

octenisept® • Comp.: 1 mg Octenidini dihydrochloridum/ml

• **Ind:** Traitement antiseptique de la peau et des muqueuses avant intervention chirurgicale ou diagnostique des régions urogénitale et rectale. Avant la pose d'un cathéter dans l'urètre ou avant l'inspection de l'utérus. Désinfection des muqueuses de la cavité buccale. Désinfection lors de blessures, désinfection des plaies et des sutures. Appropriate chez les nourrissons et les enfants nés avant terme • **Mode d'emploi:**

Appliquer avec un tampon, humidifier complètement et laisser agir 1 minute. • **CI:** Ne doit pas être appliqué dans le conduit auditif et sur la cornée. Hypersensibilité • **EI:** des troubles du goût, des sensations de brûlures, de légères paresthésies, péritonite aseptique après l'administration intrapéritonéal. • **Interaction:** le dihydrochlorure d'Octenidin ne doit pas être utilisé sur les zones proches de la peau traitée par antiseptique à base de povidone iodée, car cela peut provoquer des colorations brunes violettes sur les zones de peau traitées, difficiles à enlever au lavage. Pour éviter un éventuel dommage tissulaire, veillez à ne pas appliquer/injecter la préparation sous pression dans la tissu. En cas de cavité dans la plaie, un écoulement doit être constamment garanti (drainage ou tamis). Catégorie de remise D L'information spécialisée complète est publiée dans le Compendium suisse des médicaments.

• **Fabricant:** Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

• **Titulaire de l'autorisation:** Schülke & Mayr AG, 8500 Frauenfeld

Tenir les médicaments hors de portée des enfants!

En ce qui concerne les risques et des effets secondaires, veuillez lire attentivement la notice de ce produit et demander conseil à votre médecin.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Vaginal Applicator -INT-	20/Carton	70001128

Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, économiquement viables et conformes aux normes de qualité les plus strictes.

Avis d'expert et information

Pour avoir un aperçu de notre produit, vous pouvez consulter le site Internet www.schuelke.ch

Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec le service suivant :

Customer Care

Tél. : +41 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schplke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com