

schülke -t



dialox™

Désinfectant et détartrant à base d'oxygène actif, spécialement conçu pour les générateurs d'hémodialyse et les circuits hydrauliques

Notre plus

- Large spectre d'efficacité microbiologique
- Détartrant et désinfectant
- Prêt à l'emploi
- Temps de contact courts
- Une expérience de plus de 20 ans dans les centres de dialyse

Domaines d'utilisation

dialox™ est un produit utilisé pour un détartrage et une désinfection simultanés des générateurs d'hémodialyse et de leurs circuits hydrauliques.
dialox™ est compatible avec les générateurs d'hémodialyse et leurs circuits hydrauliques.
dialox™ empêche la formation de biofilm sur les surfaces de ces équipements destinés à la dialyse.

Conseils d'utilisation

dialox™ est utilisé pour le détartrage et la désinfection des générateurs d'hémodialyse et de leurs circuits hydrauliques.
dialox™ est prêt à l'emploi. Aucune activation du produit n'est nécessaire. Pour l'utilisation, merci de vous reporter aux recommandations du fabricant de votre générateur d'hémodialyse (par exemple 1/25 ou 1/35 à 20°C ou 37°C).
Le processus de rinçage doit être contrôlé selon les instructions des fabricants du générateur d'hémodialyse et du circuit hydraulique, à l'aide de bandelettes tests peroxyde ou acide péracétique (se référer aux instructions afférentes).
La présence de dialox™ dans les circuits pourrait être détectée par conductivité (se référer aux conditions d'usage selon les équipements).

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN14561	1 % (10 ml/l) 20 °C	10 min
Mycobactérie EN14348	10 % (100 ml/l) 20 °C	15 min
Mycobactérie EN14563	2,85 % (28,5 ml/l) 20 °C	10 min
Levure EN14562	1 % (10 ml/l) 20 °C	10 min
Fongique EN14562	3 % (30 ml/l) 37 °C	10 min
Virus EN14476	2 % (20 ml/l) 37 °C	30 min

CE 0297



Données relatives au produit

Composition:

100 g contient les substances actives suivantes :
0,4% d'acide peracétique [CAS N° 79-21-0]
6,9% de peroxyde d'hydrogène [CAS N° 7722-84-1]
4,6% d'acide acétique [CAS N° 64-19-7]
Couleur : incolore
Densité : 1,03 g/cm³ à 20°C
Point éclair : Non applicable
Forme : liquide
Viscosité dynamique : non déterminée

dialox™ est un dispositif médical de classe IIb
Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).
dialox™ est fabriqué par BIOXAL (Route de Varennes | 71 100 Chalonsur Saône | France)

Données physico-chimiques

pH 1,4 / 100 % / 20°C

Remarques particulières

dialox™ doit être conservé verticalement à une température de stockage comprise entre 5°C et 30°C, dans des locaux suffisamment ventilés.

dialox™ doit être manipulé avec précaution. Ne pas remettre du dialox™ usagé dans son bidon. Ne pas exposer à la chaleur ou directement au soleil. A conserver dans un endroit sec.

Ne jamais positionner les bidons en position couchée ou à l'envers.

Compte tenu des interactions possibles (antagonismes, inactivations, réactions dangereuses ...), le mélange ou l'emploi simultané de dialox™ avec tout autre désinfectant ou produit chimique doit absolument être évité, notamment avec les aldéhydes ou les dérivés d'halogène (hypochlorite de sodium et autres par exemple).

Compatibilité avec les matériaux : dialox™ a une bonne compatibilité avec l'acier inoxydable, PTFE, PVDF, PEHD, PP.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
dialox 5L	1/jerrycan	104104
dialox 10L	1/jerrycan	104112

Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des standards qualité élevés.

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial dédié.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalonsur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com