



solution désinfectante à base d'alcool pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux

mikrozid[®] AF liquid

Notre plus

- Prêt à l'emploi
- Large spectre d'activité avec des temps de contacts courts
- Sèche vite et ne laisse pas de traces

Domaines d'utilisation

Désinfection rapide à base d'alcool des équipements médicaux et de toutes sortes de surfaces nettoyables, présentant un risque d'infection et où des temps de contact courts sont nécessaires, tels que :

- les surfaces à proximité des patients
- les unités de traitement des patients
- les tables d'examen
- les tables d'opération et les surfaces de travail adjacentes
- les surfaces des équipements et instruments médicaux

Conseils d'utilisation

Surfaces propres

- Pulvériser à 30 cm de l'objet ou de la surface à traiter. Une simple brumisation suffit, il n'est pas nécessaire de trop mouiller.
- Laisser sécher.

Surfaces souillées : technique «spray - essuyage - spray»

- Pulvériser à 30 cm de l'objet ou de la surface à traiter.
- Essuyer avec un essuie-tout à usage unique.
- Pulvériser une deuxième fois pour désinfecter et laisser sécher.

Ne pas traiter les surfaces sensibles à l'alcool (exemple: verre acrylique).

Efficacité microbologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN13727	prêtes à l'emploi	1 min
Bacille de la Tuberculose EN14348 <i>- en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	1 min
Levure EN13727, EN16615, Selon les recommandations VAH temps de contact court <i>- en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	1 min
Fongique EN13624, EN13697 <i>- en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	2 min
VHB	prêtes à l'emploi	1 min
VHC	prêtes à l'emploi	1 min
VIH	prêtes à l'emploi	1 min
norovirus EN14476	prêtes à l'emploi	30 sec
polyomavirus SV 40	prêtes à l'emploi	5 min
rotavirus	prêtes à l'emploi	30 sec
adénovirus (Type 5)	prêtes à l'emploi	30 sec

CE 0297



mikrozid[®] AF liquid

Données relatives au produit

100 g de solution contiennent : 25 g d'éthanol (94 %), 35 g de Propan-1-ol et des agents mouillants.
Étiquetage conformément au Règlement 648/2004 : parfums

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,89 g/cm ³ / 20 °C
pH	Non applicable
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	non déterminé

mikrozid[®] AF liquid est un dispositif médical de classe IIa.
Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).
mikrozid[®] AF liquid est fabriqué par Schülke & Mayr GmbH
(Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)
TP02 - TP04

Utiliser les DM et les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Remarques particulières

Utilisez les désinfectants avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Il est recommandé de porter des gants de protection (ex. en caoutchouc nitrile). Ne pas utiliser à proximité de sources d'étincelles.

mikrozid[®] AF liquid est parfaitement compatible avec les matériaux tels que les métaux et les plastiques (sauf acrylique et surfaces sensibles à l'alcool).

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mikrozid AF liquid 250 ml FL	10/Carton	109160
mikrozid AF liquid -INT- 1 l FL	10/Carton	109301
mikrozid AF liquid -INT- 5 l KA	1/jerrycan	109166
mikrozid AF liquid -INT- 10 l KA	1/jerrycan	109116
mikrozid AF liquid 10 l KA	1/jerrycan	109102
Mikrozid AF Liquid -FR- 975 l EC	1/container	109183

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Quality Management
ISO 9001:2008



Quality Management
ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com