



schülke wipes

Système réutilisable d'humidification et de distribution de lingettes pour la désinfection des surfaces

Notre plus

- Préparation facile et rapide
- Utilisables sous 28 jours après imprégnation
- Faible taux de particules (100% polyester)
- Disponibles en deux formats : standard ou mini

Domaines d'utilisation

Système de distribution de lingettes à imprégner avec des désinfectants de surface schülke. Le système schülke wipes étant réutilisable, il n'est pas recommandé pour une utilisation en zones de travail sensibles.

Les lingettes schülke wipes peuvent être utilisées pour nettoyer et désinfecter les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs ainsi que tout type de surfaces.

Elles sont disponibles aux formats suivants :

- schülke wipes mini : 40 lingettes 30 x 30 cm
- schülke wipes standard : 100 lingettes 30 x 30 cm & 111 lingettes de dimensions 30 x 24 cm

Conseils d'utilisation

Préparation des lingettes pré-imprégnées :

N'utiliser que les produits et les concentrations recommandés par schülke (respecter strictement les informations spécifiques au produit).

Se désinfecter les mains (ex : avec du desderman® pure gel) et s'équiper d'une paire de gants neufs et d'une blouse de protection. Au cours du remplissage, veiller à ce que les gants ne soient pas contaminés par d'autres activités.

Désinfecter la surface de travail avec un produit schülke (ex : mikroqid® AF liquid)

1. Ouvrir le couvercle du distributeur schülke wipes et y placer un rouleau de lingettes sèches de la taille adéquate.

Tirer légèrement vers le haut la lingette située au coeur du rouleau.

2. Verser ensuite 2 litres de désinfectant prêt à l'emploi ou 3 litres de solution reconstituée à partir d'un désinfectant

concentré, verser lentement, en spirale du centre vers l'extérieur du rouleau. Pour la version schülke wipes mini, le volume à verser doit être de 1,5 litres quelle que soit la nature de la solution utilisée.

3. Placer la lingette située au coeur du rouleau à travers la fente de distribution, refermer soigneusement le couvercle, puis enlever et jeter la première lingette du dispositif.

4. Noter le nom et la concentration du désinfectant utilisé pour l'imprégnation des lingettes, la date de préparation, le nombre de lingettes par application et le temps de contact préconisé sur l'étiquette fournie avec chaque rouleau de lingettes, et la coller sur le champ prévu à cet effet.

5. Après 30 minutes, les lingettes sont complètement imprégnées et prêtes à l'emploi.

Remarques importantes :

Pour la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool (pavés numériques, écrans, surfaces en verre acrylique, les transducteurs à ultrasons), nous vous recommandons d'utiliser mikroqid® sensitive liquid pour l'imprégnation des lingettes.

terralin® PAA ne peut être utilisé qu'avec les schülke wipes mini.

Utilisation des lingettes pré-imprégnées :

Les surfaces fortement souillées doivent être préalablement nettoyées. Appliquer la lingette pré-imprégnée sur toute la surface à traiter, en veillant à ce que celle-ci reste humide pendant le temps de contact souhaité. Ne pas utiliser de lingettes desséchées. Respecter les recommandations d'application mentionnées sur les fiches techniques des désinfectants utilisés pour l'imprégnation des lingettes.

Le couvercle et le bouchon de distribution du dispositif doivent être maintenus fermés afin d'éviter le dessèchement des lingettes.



Remarques particulières

Nettoyage et désinfection du dispositif :

Au terme de la date d'expiration, ou à l'épuisement des lingettes préparées, éliminer totalement le désinfectant et les lingettes résiduels. Nettoyer et sécher les différents éléments du dispositif. Les désinfecter ensuite avec un spray à base d'alcools. Laisser sécher complètement avant réutilisation.

Se reporter au paragraphe intitulé « préparation des lingettes pré-imprégnées » ci-dessus.

La date d'expiration des lingettes pré-imprégnées avec un désinfectant schülke est de 28 jours à partir de la date de préparation, à l'exception des lingettes préparées avec terralin® PAA qui doivent être utilisées dans les 12 heures.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
schülke wipes 70 6x70 ST KT	1/Carton	119505
Rouleau de 111 lingettes	1/Carton	119506
Seau de distribution 100/111	1/Carton	119541
schülke wipes 70 Spenderbox	1/Carton	119540
Rouleau de 100 lingettes	1/Carton	119503
schülke wipes Distr. de lingettes -INT-	1/Carton	119523
schülke wipes mini Distr. de ling. -INT-	1/Carton	119530
schülke wipes 40 10x40 ST KT	1/Carton	119532
schülke wipes mini F.Spend.INT 5x 1ST KT	1/Carton	70000163
schülke wipes 100/111 Spend.box 5x1ST KT	1/Carton	70000161
schülke wipes Feuchttuchsp.INT 5x 1ST KT	1/Carton	70000162
schülke wipes 70 Spenderbox 5x 1ST KT	1/Carton	70000160

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Bioxal™ SA
Route de Varennes
BP30062
71103 Chalonsur Saône
France

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com