

schülke -+



Système à usage unique d'humidification et de distribution de lingettes pour la désinfection des surfaces

schülke wipes safe&easy

Notre plus

- Préparation facile et rapide
- Efficace 28 jours après imprégnation
- Participe à limiter les contaminations
- Faible taux de particules (100% polyester)
- Lingettes de grande taille : 30 x 19 cm

Domaines d'utilisation

Système de distribution de lingettes à imprégner avec des désinfectants de surface schülke. Le système schülke wipes étant à usage unique, il est recommandé pour une utilisation en zones de travail sensibles et sur les surfaces fréquemment en contact avec les mains et la peau des opérateurs. Les lingettes schülke wipes peuvent être utilisées pour nettoyer et désinfecter les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs ainsi que tout type de surfaces.

Conseils d'utilisation

Préparation des lingettes pré-imprégnées :

N'utiliser que les produits et les concentrations recommandés par schülke (respecter strictement les informations spécifiques au produit).

Se désinfecter les mains (avec du desderman pure gel de schülke, par exemple) et s'équiper d'une paire de gants neufs et d'une blouse de protection. Au cours du remplissage, veiller à ce que les gants ne soient pas contaminés par d'autres activités.

Désinfecter la surface de travail avec un produit schülke (par exemple, le septinol).

La fermeture de chaque seau de distribution est assurée par un système composé d'une étiquette autoadhésive et d'un couvercle comprenant une bague à vis et un capuchon de fermeture.

1. Retirer le couvercle du distributeur schülke wipes ainsi que l'étiquette de fermeture autoadhésive. La placer sur le côté du

seau ; les éléments relatifs à la traçabilité de la préparation y seront annotés ultérieurement.

Tirer légèrement vers le haut la lingette située au coeur du rouleau.

2. Verser ensuite 2 litres de désinfectant prêt à l'emploi ou 2,5 litres de solution reconstituée à partir d'un désinfectant concentré ;

Verser lentement, en spirale du centre vers l'extérieur du rouleau.

3. Placer la lingette située au centre du rouleau à travers la fente de distribution et visser soigneusement le couvercle ; Extraire la première lingette du dispositif et l'éliminer. Refermer complètement le seau en abaissant le capuchon.

4. Annoter le nom et la concentration du désinfectant utilisé pour l'imprégnation des lingettes, la date de préparation (ou d'expiration), le nombre de lingettes par application et le temps de contact préconisés sur l'étiquette préalablement placée sur le flan du seau de distribution.

5. Après 30 minutes, les lingettes sont complètement imprégnées et prêtes à l'emploi.

Remarque importante :

Pour la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool (par exemple les pavés numériques, les écrans d'ordinateur, les surfaces en verre acrylique, les transducteurs à ultrasons), nous vous recommandons d'utiliser mikrozid® sensitive liquid pour l'imprégnation des lingettes.

Utilisation des lingettes pré-imprégnées :

Les surfaces fortement souillées doivent être préalablement nettoyées. Appliquer la lingette pré-imprégnée sur toute la surface à traiter, en veillant à ce que celle-ci reste humide pendant le temps de contact souhaité.

Ne pas utiliser de lingettes desséchées.

Respecter les recommandations d'application mentionnées sur les fiches techniques des désinfectants utilisés pour l'imprégnation des lingettes (taux de dilution et temps de contact en fonction de l'action visée).



schülke wipes safe&easy

Remarques particulières

La date d'expiration des lingettes pré-imprégnées avec un désinfectant schülke est de 28 jours à partir de la date de préparation.

Le couvercle et le bouchon de distribution du dispositif doivent être maintenu fermés afin d'éviter le dessèchement des lingettes.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
schülke wipes safe+easy 6x111 ST KT	1/Carton	119544
schülke wipes safe+easy Disp. 10 PCS	1/Carton	119542

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



EMAS
GEPRIIFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



DQS MED
ISO 9001:2008



DQS MED
ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com