



Voor wekelijkse speciaalreiniging van dentale afzuigsystemen, kwispedoors en afzuigslangen

aspirmatic[®] cleaner

Onze pluspunten

- aldehydevrij
- eenvoudige en veilige toepassing
- bewezen reinigingskracht, gestest in uitvoerige praktijksonderzoeken, o.a. bij KaVo en Sirona
- geen storende schuimvorming
- economisch in gebruik

Toepassingsgebied

Voor de ondersteunende wekelijkse speciale reiniging van tandheelkundige zuigsysteem, de kwispedoor en de afvoerleidingen.

Gebruiksaanwijzing

Aspirmatic[®] cleaner (ter voorkoming en verwijdering van kalkaanslag) dient een- tot tweemaal per week te worden toegepast in aansluiting op de reinigende desinfectie in een 5%-ige oplossing. Maak per behandelingseenheid 2L gebruiksklare oplossing klaar met behulp van het Aspirmatic[®] systeem. Voeg hiervoor 100 ml aspirmatic[®] cleaner toe aan 1900 ml lauw water (5x kiepen via de doseerdop). Teneinde schuimvorming te voorkomen, dient u eerst de juiste hoeveelheid water af te meten, waaraan u de aangegeven hoeveelheid aspirmatic[®] cleaner toevoegt. Zuig 1,5 L gebruiksooplossing door de aanzuigslangen en giet de resterende 0,5 L in de spoelbak. Laat circa 1 tot 2 uur inwerken - niet overnacht laten staan of tijdens het weekend. Spoel aansluitend altijd door met minimaal 1 L schoon water alvorens u het afzuigstelsel weer in gebruik neemt. In geval van ernstige vervuilingen kan 10% gedoseerd worden (200 ml aspirmatic[®] cleaner bij 1.800 ml water). Het aspirmatic[®] systeem zorgt voor eenvoudige en zekere toepassing en bereiding van de oplossing. De zuigslangen zijn eenvoudig op het systeem aan te sluiten.



aspirmatic® cleaner

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid	circa 1,17 g/cm ³ / 20 °C
Kleur	geel
pH	0,9 / 100 % / 20 °C
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	> 100 °C / Methode : ISO 2719
Vorm	vloeibaar

Speciaal advies

Draag bij het hanteren van desinfecterende middelen die schadelijk zijn voor de huid goed beschermende rubberen handschoenen.

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
Aspirmatic Cleaner 2 l FL	5/Doos	150302

Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
Aspirmatic system	183701
Maatbeker 500 ml	136101

Verwante producten

- aspirmatic®

Milieu

Schulke vervaardigd haar producten volgens een gevalideerd milieu management systeem volgens Oko-Audit-richtlijn (Reg.-Nr. DE-S-150 00003).

Expert reports en informatie

Voor meer informatie en een overzichtsbrochure kunt u contact opnemen met Schulke Benelux 0031 (0) 23 535 26 34 of via de website www.schuelke.com

Schulke & Mayr heeft het certificaat van DIN EN ISO 9001 en DIN EN 46001 (reg.-nr 45601) en heeft een goedgekeurd systeem van milieubeheer in overeenstemming met de Verordening op de Eco-Controle (reg.-nr DE-S-150 00003).



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabriekanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70
www.schuelke.com
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com