



Materiaalvriendelijke, snelle reinigings- en desinfectiedoekjes, geïmpregneerd met een laag-alcoholische oplossing.

## mikrozid® universal wipes premium

### Onze pluspunten

- goede materiaalcompatibiliteit (bijvoorbeeld tablets);
- snelle werkzaamheid (Noro 30 sec.);
- effectief volgens EN 16615 (4-veldstest) in 1 minuut;
- dermatologisch getest;
- grote doekjes van hoge kwaliteit;
- kleur- en geurvrij;
- uitstekende reinigingsprestaties;
- toelatingsnr. Luxemburg 81/22/L

### Toepassingsgebied

Op alcohol gebaseerde sneldesinfectie van medische hulpmiddelen met een verhoogd risico op infectie, waarbij korte contacttijden vereist zijn en waar een materiaalvriendelijk desinfectant nodig is, bijvoorbeeld:

- Behandelunits voor patiënten
- Onderzoekstafels
- Operatietafels
- Oppervlakken van medische apparaten
- Toetsenborden en bedieningspanelen van gevoelige medische communicatie apparatuur, zoals smartphones en tablets.

### Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat al het zichtbaar vuil wordt verwijderd vóór het desinfecteren met mikrozid® universal wipes. Veeg het oppervlak grondig af met de geïmpregneerde wipe en laat het inwerken. Zorg ervoor dat u de oppervlakken volledig nat maakt en ze nat houdt gedurende de hele inwerktijd. Houd hygiënische aspecten in acht bij het openen van de softpack. Zorg ervoor dat u de deksel goed sluit na gebruik. Niet geschikt voor finale desinfectie van semikritische en kritische

medische apparaten! schülke garandeert een houdbaarheid van 1 maand nadat de verpakking is geopend.

### Microbiologische werkzaamheid

Werkzaamheid	Concentratie	Contacttijd
<b>bactericide</b> - hoge belasting	gebruiksklaar	2 min.
<b>bactericide</b> EN13727 - hoge belasting	gebruiksklaar	15 sec.
<b>tuberculocide</b> EN14348 - lage belasting	gebruiksklaar	5 min.
<b>levurocide</b> - hoge belasting	gebruiksklaar	2 min.
<b>levurocide</b> EN13624 - hoge belasting	gebruiksklaar	1 min.
<b>virucide tegen envelop virussen</b> - hoge belasting	gebruiksklaar	15 sec.
<b>beperkt spectrum virucide werking</b> EN14476 - hoge belasting	gebruiksklaar	15 min.
<b>norovirus</b> EN14476 - lage belasting	gebruiksklaar	30 sec.
<b>norovirus</b> EN14476 - hoge belasting	gebruiksklaar	60 sec.
<b>polyoma SV40</b>	gebruiksklaar	15 sec.
<b>Rotavirus</b> EN14476 - lage belasting	gebruiksklaar	15 sec.



# schülke →



Materiaalvriendelijke, snelle reinigings- en desinfectiedoekjes, geïmpregneerd met een laag-alcoholische oplossing.

## mikrozid<sup>®</sup> universal wipes premium

### Certificaten

- VAH certificaat
- IHO geregistreerd



CE 0297



## Productinformatie

### Samenstelling:

Een softpack bevat 100 kant-en-klare doordrenkte doekjes.  
100 g oplossing bevat de volgende actieve ingrediënten:  
17,4 g Propaan-2-ol, 12,6 g ethanol (94% g / g)  
Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 648/2004: <5%  
anionische oppervlakreactieve stoffen

### Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid	circa 0,95 g/cm <sup>3</sup> / van de werkzame stof
Kleur	kleurloos
pH	circa 3,5 / 100 % / van de werkzame stof
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
Flampunt	26 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / van de werkzame stof
Vorm	Waterachtig-alcoholische oplossing van nonwoven

## Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, duurzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.

## Expert reports en informatie

Bezoek onze website voor een overzicht van alle beschikbare literatuur / rapporten over het product: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Voor individuele vragen: 023 5352634, e-mail: [salesbenelux.com](mailto:salesbenelux.com). Internationaal: +49 40 52100-666, e-mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

## Speciaal advies

### Gebruik biociden veilig! Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Het product is zeer geschikt om metalen- en kunststofmaterialen te reinigen en desinfecteren. Volg zorgvuldig nationale brand en explosie beschermingsrichtlijnen op bij gebruik van ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol. Behandel alleen kleine oppervlakken. Het bereik is afhankelijk van de kamertemperatuur en de structuur van het te desinfecterende oppervlak. Meer informatie beschikbaar op aanvraag. Het product kan gebruikt worden zonder handschoenen, mits infectiepreventie en VGW (Veiligheid Gezondheid en Welzijn) dit toestaan.

Volgende maten zijn beschikbaar:

- mikrozid<sup>®</sup> universele doekjes premium (6 x 100 doekjes 20 x 20 cm) bereik \*: ongeveer. 1,0 m<sup>2</sup>
- mikrozid<sup>®</sup> universele doekjes premium maxi (6 x 80 doekjes 25 x 25 cm) bereik \*: ca. 1,5 m<sup>2</sup>

## Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
mikrozid universal wipes prem 100 ST SP	6/Doos	70000038
mikrozid univ wipes prem maxi 80 ST SP	6/Doos	70001061

## Verwante producten

- mikrozid<sup>®</sup> AF wipes
- mikrozid<sup>®</sup> PAA wipes
- mikrozid<sup>®</sup> sensitive wipes
- mikrozid<sup>®</sup> universal liquid



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

**schülke Benelux**  
Schülke & Mayr Benelux B.V.  
Oudeweg 8d  
2013 CC Haarlem, Nederland  
Tel: +31 (0) 23 535 26 34  
Fax: +31 (0) 23 536 79 70  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[salesbenelux@schuelke.com](mailto:salesbenelux@schuelke.com)

**schülke hoofdkantoor**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Duitsland  
Tel: +49 40 - 52100 - 0  
Fax: +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)