

# schülke -†



Preparat do płukania, do stosowania w maszynowym procesie przygotowania łóżek do ponownego użycia

## thermosept® BSK płyn

### Zalety

- obojętny odczyn pH
- zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu
- przystosowany do systemów pracujących z wykorzystaniem świeżej wody oraz systemów z wymuszonym przepływem obiegowym
- nie pieni się

### Obszary zastosowania

therosept®BSK jest przeznaczony do płukania po dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych za pomocą powszechnie stosowanych myjni.

### Wskazówki dotyczące stosowania

Zaleca się stosowanie preparatu thermosept® BSK z preparatem thermosept® NDR w chemiczno-termicznym procesie mycia i dezynfekcji. Zastosowanie preparatu thermosept® BSK gwarantuje, że po wysuszeniu mytych przedmiotów nie pozostaną plamy.

Stężenie użytkowe preparatu thermosept® BSK:

- do chemiczno-termicznego przygotowania łóżek, kontenerów 0,1-0,2% (1-2 g/l)
- do płukania przy termicznym przygotowaniu narzędzi 0,02 - 0,05% (0,2 - 0,5 g/l)

Zastosowanie preparatu thermosept® BSK do ostatniego płukania zapewnia szybkie i bez pozostawiania plam suszenie.



## Dane produktu

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 648/2004: 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Pozostałe składniki: solubilizatory, inhibitory korozji, regulatory pH.

### Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Kolor	bezbarwny
pH	7 / 100 % / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	37 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

## Wskazówki szczególne

Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed ciepłem.

Nie używać preparatów po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 3 lata.

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
thermosept BSK 5 kg KA	1/Kanister	144906
Thermosept BSK płyn 20 L KA	1/Kanister	144907

## Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



GERÄTETES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG. NR. 01-100-10003



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

**Dystrybutor**  
Schulke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 22 11 60 700  
Telefax +48 22 11 60 701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schuelke.com

**Wytwórca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Niemcy  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
+49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com