

schülke -t



Płynny zmiękczający wodę komponent o kwaśnym pH, do stosowania w procesie termicznego przygotowania do ponownego użycia kacek, basenów, itp.

thermosept® SKS płyn

Zalety

- zapobiega powstawaniu osadów i usuwa te już powstałe,
- po wyschnięciu nie pozostawia plam,
- nie pieni się,
- bardzo dobra kompatybilność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi,
- dobre właściwości myjące,

Obszary zastosowania

Preparat thermosept® SKS stosowany jest do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kacek, basenów itp.

Właściwości produktu

thermosept® SKS jest płynnym preparatem zmiękczającym i płuczącym (w postaci koncentratu) na bazie kwasów organicznych, nie zawiera środków powierzchniowo czynnych.

Możliwość używania do aluminium, tworzyw sztucznych, stali szlachetnej oraz misek ze stali nierdzewnej.

Wskazówki dotyczące stosowania

Stężenie użytkowe: 0,01 % na każdy 1° dH co odpowiada 0,1-0,3 % tzn. 1-3 g/l.



Dane produktu

thermosept® SKS zawiera: stabilizatory twardości, kwasy organiczne, inhibitory korozji.

Dane chemiczno-fizyczne

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Forma | ciecz |
| Gęstość | ok. 1,08 g/cm ³ / 20 °C |
| Kolor | bezbarwny |
| pH | 1,3 / 100 % / 20 °C |
| Tarcie, dynamiczne | Brak dostępnych danych |
| Temperatura zapłonu | > 100 °C |

Wskazówki szczególne

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 3 lata

Opakowania: kanistry o wymiarach: 219x244x143 mm (145806) lub 247x195x149 mm (145803)

Informacje dotyczące zamówienia

| Artykuł | Forma dostawy | Art.-Nr. |
|-----------------------------|---------------|----------|
| THERMOSEPT SKS płyn 5kg KA | 1/Kanister | 145803 |
| Thermosept SKS płyn 5 kg KA | 1/Kanister | 145806 |

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com