

schülke -†



Produkt do stosowania na rany powierzchniowe ostre, otarcia, skaleczenia, oparzenia i rany trudno gojące się

**NOWOŚĆ -
PRZYSPIESZA
GOJENIE***

octenisept® Gel

Zalety

- przyspiesza gojenie ran i oparzeń
- zmniejsza odczuwanie bólu
- zapewnia optymalny poziom wilgotności w ranie
- zmniejsza powstawanie blizn
- zapobiega przywieraniu opatrunków do rany
- nie powoduje pieczenia
- łagodzi objawy świądu
- dzięki zawartości oktenidyny - chroni przed patogenami, zapobiegając rozwojowi infekcji

Obszary zastosowania

Żel octenisept jest przeznaczony do stosowania:

- w ranach powierzchniowych - takich jak: otarcia, skaleczenia, rany ostre, cięte
- w ranach powierzchniowych trudno gojących się
- w oparzeniach I i II stopnia - w tym oparzeniach słonecznych
- do ran suchych, w celu zapewnienia nawilżenia i oczyszczenia
- do ran pooperacyjnych
- możliwość łączenia z opatrunkami specjalistycznymi, w tym zawierającymi srebro
- po zabiegach medycyny estetycznej i tatuażu
- pielęgnacja podrażnionej skóry okolic intymnych

Właściwości produktu

Specjalna formuła produktu octenisept® gel zapewnia optymalne nawilżenie rany i tworzy warstwę ochronną przed bakteriami, zapobiegając ich przedostawaniu się do rany. Ponadto dodatek oktenidyny pozwala skutecznie zahamować rozwój zakażenia, chroniąc przed infekcją i stanami zapalnymi. Badania wskazują, iż znacząco przyspiesza gojenie. octenisept® gel dzięki zawartości

hydroksyetylocelulozy zmniejsza parowanie i utratę płynu przez naskórek. Ponadto pochłania nadmiar płynu z wigotnych, sączących się ran powierzchniowych oraz zmiękcza miejsce kontaktu z opatrunkiem.

Chłodzące działanie produktu octenisept® gel łagodzi uporczywe objawy świądu.

octenisept® gel jest bezbarwny i nie powoduje pieczenia po aplikacji.

Wskazówki dotyczące stosowania

Nanieść na skórę lub ranę cienką warstwą żelu. Ranę należy wcześniej oczyścić i odkazić preparatem octenisept®. W razie potrzeby zabezpieczyć ranę bandażem lub plastrem. Żel nakładać 1-2 razy dziennie, aż do całkowitego wygojenia. Ze względów higienicznych końcówka tubki z żelem nie może dotykać rany ani innych powierzchni.

CE 0297



octenisept® Gel

Dane produktu

Aqua purificata, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose,
Octenidine HCl

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	lepka ciecz
Gęstość	ok. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	niemal bezbarwny
pH	6,9 / 100 % / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	ok. 5.050 mPa*s
Temperatura zapłonu	> 100 °C

Wskazówki szczególne

octenisept® gel nie powinien być stosowany w przypadku stwierdzonej alergii na produkt lub gdy istnieje podejrzenie uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem. octenisept® gel jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. octenisept® gel nie może być stosowany na chrząstki. Nie wolno wprowadzać produktu do uszu, oczu ani nosa. Nie używać do infuzji, wstrzykiwać! Nie połykać! Tylko do użytku zewnętrznego na ostre rany skóry. Na rany przewlekłe należy stosować sterylny octenilin® żel. Należy używać wyłącznie nieuszkodzonych opakowań. Nie stosować po terminie przydatności.

Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
octenisept Gel -PL- 20 ml TB	20/Karton	70003021

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Wyrób medyczny

* Na podstawie badania klinicznego: Efficacy and cost-effectiveness of octenidine wound gel in the treatment of chronic venous leg ulcers in comparison to modern wound dressings Hämmerle G, Strohal R



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-10023



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca:
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com