



Uniwersalny preparat w proszku do maszynowego czyszczenia alkalicznego instrumentów, szkła laboratoryjnego, oprzyrządowania laboratoryjnego oraz narzędzi medycznych

mucapur® MP

Zalety

- wyjątkowe właściwości rozpuszczania i usuwania brudu
- idealny do mycia szkła
- niezawodnie usuwa silne zabrudzenia, takie jak krew, białko i pozostałości skrobi
- wysoka tolerancja materiałowa
- ekonomiczny w użyciu

Obszary zastosowania

mucapur® MP jest przeznaczony do alkalicznego czyszczenia instrumentów medycznych i oprzyrządowania laboratoryjnego oraz narzędzi medycznych wykonanych z metalu, szkła, tworzywa sztucznego, gumy, porcelany, kwarcu, ceramiki. Preparat do stosowania w myjniach dezynfektorach oraz zmywarkach z możliwością stosowania proszku.

Wskazówki dotyczące stosowania

Stężenia użytkowe:

- przy normalnym zanieczyszczeniu 0,1% (10g na 10l wody)
- przy wysokim zanieczyszczeniu 0,4% (40g na 10 l wody)

Wymaganą ilość preparatu mucapur® MP należy odmierzyć za pomocą dołączonej miarki.



Dane produktu

Skład: Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004: >30% fosforany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% środki wybielające na bazie chloru. Substancje dodatkowe: alkalia, metakrzemian sodu, nośnik chloru, inhibitory korozji, substancje pomocnicze.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	granulowany
Kolor	biały
pH	ok. 12 / 5 g/l / 20 °C / roztworu wodnego
Tarcie, dynamiczne	Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Termin ważności: 3 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
mucapur MP 5kg Eimer	1/Wiadro	230053

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com