

schülke -†



Gotowy do użycia preparat do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu

desprej[®] sensitive płyn

Zalety

- szerokie spektrum działania
- krótki czas
- przyjemny zapach
- doskonała kompatybilność materiałowa
- gotowy do użycia

Właściwości produktu

Desprej[®] sensitive jest gotowym do użycia preparatem do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, vaccinia) oraz bójczo wobec wirusa rota. Charakteryzuje się doskonałą kompatybilnością materiałową w tym wobec tworzyw sztucznych m. in. takich jak szkło akrylowe (plexiglas).

Wskazówki dotyczące stosowania

Dezynfekowane powierzchnie należy spryskać lub przetrzeć chusteczką nasączoną preparatem.

Dezynfekowana powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez cały wymagany do osiągnięcia skuteczności bójczej czas.

CE 1023



desprej[®] sensitive płyn

Dane produktu

Zawiera: chlorek didecyldimetyloamoniowy 0,5 g/kg, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diamina 0,2 g/kg, biguanid poliheksamentylenowy 0,5 g/kg.

Wskazówki szczególne

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach chronionych przed wpływem warunków środowiskowych, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od 0 do +25 st. C.

Termin ważności: 2 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Desprej Sensitive płyn 500 ml FL	20/Karton	70000072
Desprej Sensitive płyn 5 kg KA	1/Kanister	70000073

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485 oraz ISO 9001.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon + 420 558 320 260
www.schulke.cz