



Dwukomponentowy preparat do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich, narzędzi oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych

discleen® endo PAA płyn

Zalety

- nie zawiera aldehydów
- dobra kompatybilność materiałowa
- pełne spektrum bójcze
- opinia Karl Storz
- możliwość kontroli aktywności za pomocą dedykowanych pasków testowych



Właściwości produktu

Discleen Endo PAA jest preparatem przeznaczonym do manualnej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezyjologicznego oraz pozostałych termolabilnych wyrobów medycznych. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec adenowirusa, poliovirusa oraz sporobójczo (wobec *Bacillus subtilis* i *Bacillus cereus*).

Wskazówki dotyczące stosowania

W celu przygotowania roztworu roboczego należy do kanistra z substancją bazową dodać aktywator, zamknąć, dokładnie wymieszać i odczekać 20 minut. Po tym czasie preparat jest gotowy do użycia. W czasie dezynfekcji należy zwracać uwagę na całkowite zanurzenie dezynfekowanych narzędzi. Wszelkie dreny oraz kanały endoskopu należy wypełnić roztworem preparatu. Należy przestrzegać zalecanych czasów oddziaływania środka. Dezynfekcję należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wanienki dezynfekcyjne powinny pozostawać przykryte. Aktywny roztwór roboczy umieszczony w kanistrze lub zamkniętej wannie dezynfekcyjnej wykazuje biobójczą skuteczność 7 dni lub 50 cykli. Skuteczność roztworu roboczego należy na bieżąco kontrolować za pomocą pasków testowych Discleen Endo PAA test strip. Nie należy stosować do narzędzi wykonanych z miedzi, mosiądzu, kolorowego aluminium anodowanego i ocynkowanych części.



Dane produktu

Substancja czynna: in-situ generowany kwas nadoctowy 2,3g/kg. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, inhibitory korozji.

Opakowanie: kanister z roztworem bazowym 4940g, aktywator 60 g oraz 1 op. pasków testowych.

Wskazówki szczególne

Pojemnik przechwywać szczelnie zamknięty. Nosić odpowiednią odzież ochronną oraz rękawice ochronne. Przechowywać w suchych pomieszczeniach w dostatecznej odległości od źródeł ciepła. Temperatura składowania od -10 do 25 st. C. Nie narażać na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

Termin ważności: 18 miesięcy

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Discleen Endo PAA Set -CZ/SK/PL- 1 SE	1/Karton	70000089

Badania i informacje

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz