

schülke -†



desam® effekt + płyn

Koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów oraz powierzchni wyrobów medycznych

Zalety

- mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych oraz innych powierzchni
- produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy
- szerokie spektrum działania
- właściwości myjące
- wysoka wydajność preparatu (niskie stężenia)
- możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących

Obszary zastosowania

Jako produkt biobójczy - desam® effekt+ to płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, poradnie, ambulatoria, ZOL), kuchniach, zakładach przetwórczych oraz produkcyjnych, żłobkach, przedszkolach, higienie komunalnej.

Jako wyrób medyczny - desam® effekt+ to preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych. Produkt nie pozostawia osadów, smug, warstwy klejącej; nie posiada drażniącego zapachu.

Właściwości produktu

desam® effekt+ wykazuje działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy oraz wirusobójcze (wobec wirusów BVDV/vaccinia, noro, rota i adeno). Z możliwością stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej, cynku, polietylenu.

Wskazówki dotyczące stosowania

desam® effekt+ należy rozcieńczyć w wodzie o temperaturze 20-25 st. C do stężenia roztworu odpowiadającego oczekiwanemu spektrum działania.

- bakteriobójczo EN 13727+A1 - 0,25% (1 ml/l) - 5 min.

- bakteriobójczo EN 13697 - 0,25% (2,5 ml/l) - 10 min.
- bakteriobójczo EN 16615 - 0,5% (5 ml/l) - 5 min.
- bójczo wobec prątków gruźlicy EN 14348 - 1% (10 ml) - 15 min.
- prątkobójczo EN 14348 - 1% (10 ml) - 30 min.
- drożdżakobójczo EN 13624 - 0,25% (2,5 ml/l) - 5 min.
- drożdżakobójczo EN 13697 - 0,25% (2,5 ml/l) - 5 min.
- drożdżakobójczo EN 16615 - 0,5% (5 ml/l) - 5 min.
- grzybobójczo EN 13624 - 1% (10 ml/l) - 15 min.
- grzybobójczo EN 13697 - 1% (10 ml/l) - 60 min.
- bójczo wobec wirusów osłonkowych: BVDV, vaccinia DWV/RKI - 0,5% (5 ml/l) - 10 min.
- bójczo wobec wirusów osłonkowych: BVDV, vaccinia DWV/RKI - 0,25% (2,5 ml/l) - 30 min.
- bójczo wobec rotawirusa EN 14476 - 0,5% (5 ml/l) - 15 min.
- bójczo wobec norowirusa EN 14476 - 0,5% (5 ml/l) - 30 min.
- bójczo wobec adenowirusa EN 14476 - 1% (10 ml/l) - 60 min.

Powierzchnie wyrobów medycznych mogą być dezynfekowane poprzez przetarcie. Podczas dezynfekcji należy zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. desam® effekt + nie jest odpowiedni do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. Nie przekracza podanego czasu kontaktu.

Powierzchnie i przedmioty nie będące wyrobami medycznymi mogą być dezynfekowane poprzez przetarcie lub całkowite zanurzenie. Podczas dezynfekcji należy zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Powierzchnie mające kontakt z żywnością służyć dokładnie wodą o jakości wody pitnej.

CE 1023



Dane produktu

Substancje czynne: Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 19g/100g, 2-Fenoksytanol 10g/100g, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) 7,2g/100g, Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) 3g/100g
Pozostałe składniki: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	0,98 - 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	żółty
pH	11 - 12 / 100 % / 20 °C
Temperatura zapłonu	45,5 °C / Metoda : DIN EN ISO 13736

Wskazówki szczególne

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w suchych pomieszczeniach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze od +5 do +25°C. Nie używać do powierzchni wykonanych z miedzi, mosiądzu, aluminium, niestabilnych oraz silikonowych. Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności 2 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Desam Effekt + 1 l FL	12/Karton	70002117
Desam Effekt + 5 l KA	1/Kanister	70002118

Badania i informacje

Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7468/18
Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485 oraz ISO 9001.
Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-10023



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor/Podmiot odpowiedzialny
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 596 091 421
www.schulke.cz