

schülke -†



Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu

desam[®] spray

Zalety

- szerokie spektrum działania
- krótki czas działania
- gotowy do użycia
- opakowanie ze zintegrowanym spryskiwaczem
- nie wymaga spłukiwania

Obszary zastosowania

desam[®] spray przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholi.

Właściwości produktu

desam[®] spray jest preparatem zawierającym w składzie mieszaninę alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, adenowirusa, rotawirusa, norowirusa oraz wirusa polio.

Wskazówki dotyczące stosowania

desam[®] spray stosować bez rozcieńczania poprzez rozpylenie preparatu na wcześniej oczyszczone i suche powierzchnie wyrobów tak, aby powierzchnie zostały dokładnie zwilżone lub poprzez przetarcie powierzchni jednorazową chusteczką zwilżoną preparatem. Należy pozostawić zwilżone powierzchnie do osiągnięcia wymaganego spektrum działania i pozostawić powierzchnie do wyschnięcia lub nadmiar produktu po oczekiwany czasie kontaktu usunąć za pomocą czystej chusteczki.

CE 1023



Dane produktu

100g preparatu zawiera: etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamonu - 0,25g

Wskazówki szczególne

Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od żywności, napojów, wody pitnej i pasz dla zwierząt. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i unikać kontaktu z materiałami palnymi. Zalecana temperatura przechowywania od -10 do +25°C. Nie stosować na materiały wrażliwe na działanie alkoholu (pleksi, powierzchnie akrylowe, makrolon, guma, miękkie PVC, lakierowane powierzchnie). Nie stosować na gorące powierzchnie oraz na włączone urządzenia elektryczne. desam[®] spray nie jest odpowiedni do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego.

Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
desam spray PL 1 l	12/Karton	70002790
desam spray CZ/SK/PL 5 l	1/Kanister	70002792
desam spray -CZ/SK/PL- 5 l	1/Kanister	70003374

Badania i informacje

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7656/19.

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Produkt do użytku profesjonalnego.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-10003



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.com

Wytwórca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 596 091 421
www.schulke.cz