

schülke -†



Tekutý alkalický čistič na strojový reprocessing zdravotníckych pomôcok a laboratórneho vybavenia.

Automatický
reprocessing
- umývanie

thermosept® RKF

Naše Plus

- ľahko zmývateľný
- Neobsahuje fosfáty ani tenzidy
- Silný čistiaci účinok
- Formulácia so zníženou penivosťou

Oblasti použitia

Vhodný pre termický a chemotermický reprocessing chirurgických a mikrochirurgických nástrojov, rigidných endoskopov, anestéziologického vybavenia, operačnej obuvi, podložných mís, dojčenských fliaš a kontajnerov z nerezovej ocele. Vhodný na vybavenie zo skla, porcelánu, plastov a nerezovej ocele.

Pred reprocessingom pomôcok z eloxovaného hliníka sa uistite, či sú pomôcky kompatibilné s alkalickým čističom. V prípade, že kompatibilné nie sú, použite neutrálne **thermosept® RKN-zym** alebo mierne alkalický **thermosept® Xtra**. **thermosept® RKF** je určený pre použitie v umývacích dezinfektoroch a multikomorových umývacích dezinfektoroch.

Návod na použitie

Dávkovanie:

- 0,3-1% (3-10 ml / l)
- štandardné dávkovanie 0,5% (5 ml / l) pri teplote 55 ° C - 60 ° C po dobu 3-10 min

Koncentrácia, doba čistenia a teplota sú závislé na miere znečistenia nástrojov. Dávkovanie sa vykonáva automaticky podľa nastavenia integrovaného dávkovacieho čerpadla v umývacom automate alebo dezinfektore. Ako prevencia vzniku alkalických rezíduí sa odporúča oplach s neutralizátorom **thermosept® NKZ**.

thermosept® RKF nie je vhodný pre zdravotnícke pomôcky a predmety z eloxovaného hliníka. Na čistenie predmetov z materiálov citlivých na alkálie použite **thermosept® RKNzym** alebo **thermosept® X-tra**. Pre ďalší krok a finálny oplach v rámci automatického reprocessingu použite

demineralizovanú vodu. Vždy dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok.

CE



Zloženie

<5% fosfonátov, hydroxid draselný, inhibítory korózie

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	> 100 °C / Metóda: ISO 2719
Dynamická viskozita	cca. 3 mPa.s / Metóda: ISO 3219
Farba	bezfarebný - žltý
Forma	kvapalina
Hustota	1,12 - 1,13 g/cm ³ / 20 °C
pH	14 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Len pre profesionálny trh. Pri manipulácii s koncentrátom používajte osobné ochranné pomôcky, zamedzte kontaktu s pokožkou a očami. Predmety z eloxovaného hliníka musí byť otestované na kompatibilitu s alkáliami.

Doba expirácia: 60 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Thermosept RKF 10 Kg	1/Kanister	146309
Thermosept RKF 5 Kg	1/Kanister	146305
Thermosept RKF 30 Kg	1/Kanister	146303

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok tr. I



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com