

# schülke -†



Tekutý neutralizačný prípravok na báze kyseliny fosforečnej pre automatický reprocessing zdravotníckych pomôcok a laboratórneho vybavenia.

Kyslý oplach

## thermosept® NKP

### Naše Plus

- Nepení
- Pre neutralizáciu a kyslé čistenie
- Bez tenzidov
- Široké spektrum použitia

CE

### Oblasti použitia

Vhodný pre neutralizáciu v procese automatického reprocessingu chirurgických nástrojov po alkalickom umývaní, a to na prevenciu proti pôsobeniu alkalických rezíduí. Tiež vhodný pre predčistenie aj ako základný umývacie prípravok na nástroje a interiéry umývačiek, alebo ako čistiaci prípravok pre manuálne použitie ponorením. Pred použitím prípravku otestujte odolnosť materiálu voči kyselinám. Vhodný pre jednokomorové aj viackomorové umývačky.

### Návod na použitie

#### Dávkovanie:

- Pre neutralizáciu po alkalickom umývaní: 0,1 - 0,2% (1-2 ml / l)
- Ako kyslé predumývanie: 0,2 - 2% (2 - 20 ml / l)
- Dôkladné čistenie nástrojov a vnútorných priestorov umývačiek: 4% (40ml / l)
- Mechanické čistenie ponorom: 4% (40ml / l)

Pre zlepšenie výsledku čistenia odporúčame posledný oplach vykonať demineralizovanou vodou. Dávkovanie sa vykonáva automaticky podľa nastavenia integrovaného dávkovacieho čerpadla v umývacom automate alebo dezinfektore. Vždy dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok.

**thermosept® NKP** nie je vhodný na nástroje z farebných kovov, chrómu a eloxovaného hliníka. Uistite sa, že vyššie uvedené materiály nie sú obsiahnuté v komponentoch umývacieho automatu ani odtoku.



## Zloženie

thermosept® NKP obsahuje kyselinu fosforečnú.  
Neobsahuje tenzidy

### Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,43 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	1,2 / 100 % / 20 °C

## Zvláštne upozornenia

Doba expirácie: 60 mesiacov

## Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Thermosept NKP 6 kg	1/Kanister	146403
Thermosept NKP 20 kg	1/Kanister	146409

## Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

## Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy I.



EMAS  
GEPRÜFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG.-NR. D-150-10003



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

**Distribútor**  
Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
www.schulke.sk  
schulkesk@schuelke.com

**Výrobca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com