



Tekutý prípravok na chemotermickú dezinfekciu flexibilných endoskopov

Nízka penivosť

thermosept® ED

Naše Plus

- Široké spektrum účinnosti
- Výborná materiálová kompatibilita
- Virucídny podľa EN 14476, EN17111 a smernice DVV/RKI
- Sporicídní účinnosť podľa EN15883-4

Oblasti použitia

thermosept® ED je dezinfekčný prípravok na chemotermický reprocessing flexibilných a rigidných endoskopov vrátane endoskopického príslušenstva, ako aj termolabilných zdravotníckych pomôcok (napr. anestetický materiál). Produkt je určený na použitie v automatických reprocesoroch endoskopov (AER) a umývacích a dezinfekčných zariadeniach (WD). Kompatibilita bola testovaná v rozsiahlych mikrobiologických a materiálových skúškach - produkt je možné použiť na endoskopy všetkých popredných výrobcov - Belimed, BHT, Getinge, Olympus, Steelco, Steris a Wassenburg. **thermosept® ED** odporúčame používať v kombinácii s pH neutrálnym čističom **thermosept® ER** / **thermosept® xtra**.

Účinnosť

Baktericídny, mykobakteriocídny, fungicídny, virucídny, sporicídnny
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Dávkovanie:

1% - (10 ml / l), 5 min pri teplote 55 ° C

Dávkovanie sa vykonáva automaticky podľa nastavenia integrovaného dávkovacieho čerpadla v umývacom automate alebo dezinfektore. Vždy dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok. Nemiešajte

s inými produktmi. Produkt je kompatibilný aj s čističom **thermosept®ER**

CE 0297



Zloženie

100 g thermosept® ED obsahuje: 20 g glutaraldehyd
Ďalšie zložky: korózne inhibítory, rozpúšťadlá, komplexotvorné látky

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	63 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Dynamická viskozita	cca. 3,2 mPa.s / 20 °C / Metóda : DIN 53019
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,04 g/cm ³ / 20 °C
pH	3,6 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Len na profesionálne použitie. Akékoľvek vážne udalosti súvisiace s produktom je potrebné hlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu. Dodržujte odporúčania výrobcov prístrojov a endoskopov/prístrojov.
V závislosti od kvality vody sa môžu vyskytnúť farebné zmeny na kovových častiach endoskopov. Fungovanie endoskopov nie je ovplyvnené.

Nemiešajte s inými produktmi. Produkt je kompatibilný s thermosept® ER a thermosept® X-tra enzymatickým čističom. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným žiarením. Skladujte pri izbovej teplote v pôvodnom obale.

Doba expirácia: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Thermosept ed 5 l	1/Kanister	181001

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prípravok triedy IIb



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com