



Práškový dezinfekčný prípravok na báze aktívneho kyslíku. Vhodný k dezinfekcii a umývaniu akýchkoľvek umývateľných plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov.

Virucídný
od 0,5%

perform®

Naše Plus

- Univerzálne použitie
- Bez chlóru
- Výborné čistiace vlastnosti
- Výborná materiálová kompatibilita
- Široké spektrum účinnosti
- Použitie aj za prítomnosti pacientov
- Nedráždi dýchacie cesty
- Plne virucídny účinok

Oblasti použitia

Perform sa používa k dezinfekcii a čisteniu plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov. Je vhodný na akékoľvek umývateľné plochy a povrchy. Je vhodný k dezinfekcii v miestach kde sú vysoké nároky na užívateľský komfort a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Perform má výbornú materiálovú kompatibilitu aj s problematickými materiálmi akým je napr. akrylátové sklo (inkubátory). Prípravok je tiež vhodný k dezinfekcii ochranných a inhalačných dýchacích masiek, resuscitačných figurín, odtlačkových hmôt atď.

Účinnosť

Baktericídny, kompletne virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny, sporocídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Na prípravu pracovného roztoku rozmiešajte príslušné množstvo prípravku vo vlažnej vode. Plochy a povrchy predmetu utrite syntetickou utierkou namočenou v pracovnom roztoku. Malé vodeodolné predmety je možné ponoriť do pracovného roztoku a po uplynutí doby expozície opláchnite vodou a osušte. Dýchacie masky a školiace figuríny

utrite syntetickou utierkou namočenou v roztoku a po dobe expozície opláchnite vodou / utrite vlhkou textíliou. Nepoužitý pracovný roztok je stabilný po dobu 30 hodín.

CE 0297



Zloženie

100 g prípravku perform obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 45g monoperoxid draselný, sodná soľ

Ďalšie zloženie:

- < 5-15% anionaktívne tenzidy
- < 5% neionogénne tenzidy
- < 5% fosfona#ty
- < 5% mydlo

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	Nepoužiteľné
Farba	biely
Forma	zrnitý
pH	cca. 4 / 5 g/l / 20 °C / ve vodě

Zvláštna upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Pri skladovaní neprekračujte izbovú teplotu. Používajte ochranné rukavice (napr. z butylkaučuku). Pri použití na textilie môže mať bieliace účinky. Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
perform -PL,CZ,SK- 900 g DS	4/Kartón	122323
Perform 900 g, dóza	4/Kartón	122322
perform (250x) 40 g BT	250/Kartón	70001859
Perform 40g, sáčok	1/Kartón	122304

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

- Zdravotnícky prostriedok triedy IIa
- Biocídny prípravok - Reg.: bio/1216/D/16/CCHLP



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com