

# schülke -†



Tekutý dezinfekčný prípravok na báze kvartérnych amóniových zlúčenín vhodný k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov.

Na citlivé  
povrchy

## mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid

### Naše Plus

- Šetrne dezinfikuje povrchy zdravotníckych prostriedkov
- Vhodný na citlivé povrchy
- Okamžite k použitiu
- Zaručuje rýchly dezinfekčný efekt - už od 1 minúty
- Pohodlné a jednoduché používanie
- Vhodný k dezinfekcii zle dostupných miest

### Oblasti použitia

Mikrozid sensitive liquid sa odporúča k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov (stoly, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Vhodný k dezinfekcii povrchov citlivých na alkohol. Prípravok je vhodný tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia zdravotníckych pomôcok ako napr.:

- Povrchy v blízkosti pacientov
- Kontaktné plochy
- Ordinácie
- Plastové a akrylátové povrchy
- UZV sondy
- Klávesnice

### Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny na BVDV/Vaccinia (HIV/ HBV/HCV) / Noro / Rota/ Polyoma.

Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

### Návod na použitie

Mikrozid sensitive liquid sa neriedi a aplikuje sa koncentrovanej pomocou postreku alebo náteru. Povrch dôkladne namočte roztokom a nechajte pôsobiť po expozičnú dobu požadovanej mikrobiologickej účinnosti. Prípadné

prebytočné množstvo tekutiny utrite po uplynutí doby expozície jednorazovou utierkou.

CE 0297



# mikrozid<sup>®</sup> sensitive liquid

## Zloženie

100 g roztoku mikrozid sensitive liquid obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 26 g Kvartérne amóniove# zlúč#eniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy
- 0,26 g Kvartérne amóniove# zlúč#eniny, didecyldimethylammonium chlorid
- 0,26 g Kvartérne amóniove# zlúč#eniny, C12-14-alkyl [(ethylphenyl)methyl]dimehtyl, chloridy

## Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	neurčené
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	5 - 8/ 100 %/ 20 °C



## Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh.

Doba expirácie: 60 mesiacov.

## Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Mikrozid sensitive liquid 1 l	10/Kartón	165715
Mikrozid sensitive liquid 5 l	1/Kanister	109193

## Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

## Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

**Distribútor**  
Schulke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
www.schulke.sk  
schulkesk@schuelke.com

**Výrobca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Phone +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com