

schülke -†



Koncentrovaný kvapalný dezinfekčný prípravok na báze aldehydov a KAS určený k jednorazovej dezinfekcii a umývaniu všetkých umývateľných plôch a povrchov.

Tiež na strojové čistenie

desam® GK

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Výborná materiálová znášanlivosť
- Vhodný na ručnú aj strojovú dezinfekciu
- Kompatibilný s vreckovkami wettask a schülke wipes

Oblasti použitia

Desam GK je určený k manuálnej dezinfekcii aj strojovému čisteniu všetkých vodeodolných a umývateľných plôch a predmetov v oblastiach zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, v komunálnej hygiene, všeobecnej hygiene, v inštitúciách, v potravinárstve a stravovacích zariadeniach, vo veterinárnej praxi. Prípravok je kompatibilný s viacerými typmi materiálov ako je nerezová oceľ, farebné kovy a ich zliatiny, pochrómované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potiahnuté plastom, plexisklo, plasty, pryž a akryláty.

Účinnosť

Baktericídny, virucídny, levurocídny, mykobaktericídny, sporocídny, tuberkulocídny, fungicídny
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Desam GK sa používa na povrchy vopred zbavené viditeľného znečistenia. K získaniu požadovanej koncentrácie pracovného roztoku zmiešajte potrebné množstvo prípravku vo vlažnej vode (20-25 °C). K získaniu správnej koncentrácie použite aplikačné pomôcky (odmerky, pumpy, zmiešavač). Plochy a povrchy predmetov utrite pomocou textílie (mop, utierka a pod.) namočenej v pracovnom roztoku. Malé vodeodolné predmety je možné ponoriť do pracovného roztoku, a po uplynutí doby expozície opláchnuť vodou a usušiť. Nemiešajte so žiadnymi inými čistiacimi či dezinfekčnými prípravkami, obzvlášť na báze amínov alebo peroxidov. Povrchy, ktoré po

dezinfekcii prichádzajú do kontaktu s potravinami opláchnite dôkladne vodou.



Zloženie

100 g prípravku **desam GK** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 6 g Glyoxal
- 3,5 g Glutaraldehyd
- 2,3 g Kvartérne amónne zlúčeniny, Benzyl C-12-16-alkyldimethyl, chloridy

Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh. Nemiešajte so žiadnymi inými čistiacimi či dezinfekčnými prípravkami. Roztok skladujte v uzatvorených nádobách. Pri práci používajte ochranné pomôcky. Neskladujte na priamom slnečnom svetle a spoločne s horľavými materiálmi. Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Desam gk 1 l	12/Kartón	70000205
Comfort plus 1000 kg	1/Kartón	70000303
Desam gk 200 kg	1/Kartón	70000304
Desam gk 50 kg	1/Kartón	70000206
Desam gk 5 kg	1/Kanister	70000204



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Biocídny prípravok



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz